

PRESTIGE MONOPHASE

PRESTIGE MONOPHASE - Полівінілсилоксановий гідрофільний відбитковий матеріал середньої в'язкості (звичайної консистенції) текучий для нанесення безпосередньо на підготовлені ділянки або у якості матеріалу однотипної в'язкості. Тиксотропний, гідрофільний, має ідеальне співвідношення між робочим часом та часом твердіння, високу точність передачі деталей, підвищену розмірну стабільність.

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт є ідеальним для зняття всіх видів відбитків, що використовуються для виготовлення знімних та незнімних протезів, а також ортодонтичних конструкцій, конструкцій з брекетами, тимчасових конструкцій і т.п.

Для використання лише лікарями-стоматологами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ISO 4832/ADA 19	Тип 2 Звичайна консистенція
Співвідношення база-катализатор	1:1
Робочий час*	2 хвилини
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини 30 секунд
Час твердіння	5 хвилин 30 секунд
Деформація при стисканні	3% - 5%
Відновлення форми	>99,5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<-0,20%
Твердість за Шором (A)	50
Колір	Зелений

*Відлік вказаних вище часових параметрів співпадає з початком замішування при температурі 23°C (73° F). Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.

Підготовка диспенсера – вказівки до використання:

- Повністю відтягніть назад плунжер диспенсера, піднявши розташований знизу чорний звільняючий важіль.
- Підніміть фіксатор картриджа на диспенсері.
- Встановіть картридж V-подібним пазом на його фланці донизу. В такому випадку фіксатор має опуститись без зусиль.
- Після того, як картридж було встановлено на диспенсер, перевірте ковпачок на чверть оберту. Зніміть його, застосувавши адекватне зусилля. Не викидайте ковпачок.

- Переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та каталізатор) рівномірно видавлюються з картриджа. Для цього злегка натисніть на ручку диспенсера, видавивши незначну кількість матеріалу. Після цього ретельно очистіть носики картриджа.
- Міцно приєднайте змішуючу насадку, сумістивши V-подібний паз на кольоровому обідку змішуючої насадки з відповідною позначкою на картриджі. Далі, застосовуючи деяке зусилля саме до кольорового обідка насадки, а не до частини, в якій відбувається змішування двох компонентів, поверніть її на чверть оберту.
- Тепер пристрій готовий до застосування; видавлюйте матеріал, натискаючи на ручку диспенсера з невеликим зусиллям.
- Після використання зніміть насадку та встановіть на місце ковпачок, як описано вище.
- Для установки нового картриджа дотримуйтеся вище наведених вказівок від самого початку.

Відбитки, зняті Prestige Monophase, можна покривати сріблом або міддю у ванночках для гальванізації.

Дезінфекція відбитка

Після зняття відбитку його потрібно дезінфікувати для повного видалення дрібних часточок матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним у дезінфікуючий розчин протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається.

Відливання моделей

Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через 1 годину після полімеризації. Стабільність розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії Prestige сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку.

Зберігання

Зберігайте відбитки при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності продукту – 3 роки від дати виробництва за умови правильного зберігання. Зберігайте продукт в прохолодному сухому місці при температурі 4° – 28° C (39° – 82° F) у герметично закритому контейнері.

Тримайте подалі від джерел тепла, іскор та відкритого полум'я.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії і термін придатності зазначені на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

Важливо: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- Уникайте контакту очей та шкіри з каталізатором.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима ретельно промийте їх водою та зверніться до лікаря.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, в тому числі і на лабораторний спецодяг.

Упаковка

Код продукту	Індивідуальна упаковка
055010 PRESTIGE MONOPHASE	100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл) + 12 змішувальних насадок