

PRESTIGE A PLUS LIGHT

Prestige A Plus Light – А-силікон – Тиксотропний гідрофільний полівінілсилоксан низької в'язкості для зняття високоякісних других відбитків за двоетапною методикою. Ідеальне співвідношення між робочим часом та часом твердіння, висока точність передачі деталей, підвищена розмірна стабільність відбитку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Prestige A Plus Light показаний для усіх видів стоматологічних відбитків, що використовуються для виготовлення постійних та знімних протезів, при роботі з ортодонтичними конструкціями, брекетами, тимчасовими конструкціями і т.п.

Для використання лише лікарями- стоматологами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 4823 / ADA 19	Тип 3 Консистенція коригуючого матеріалу
Співвідношення база-катализатор	1:1
Час замішування*	Автоматичне замішування при видавлюванні з картриджа
Робочий час*	2 хвилини
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини 30 секунд
Час твердіння*	5 хвилин 30 секунд
Деформація при стисканні	3%-5%
Відновлення форми	>99.5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<0.20 %
Твердість за Шором (А)	45±2
Колір	Периковий

*Відлік вказаних вище часових параметрів починається з фази замішування при температурі 23°C (73°F). Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.

ПІДГОТОВКА ДИСПЕНСERA – ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- Повністю відтягніть назад плунжер диспенсера, піднявши розташований знизу чорний звільняючий важіль.
- Підніміть фіксатор картриджа на диспенсері.
- Встановіть картридж V-подібним пазом на його фланці донизу. В такому випадку фіксатор має опуститись без зусиль.
- Після того, як картридж було встановлено на диспенсер, перевірте ковпачок на чверть оберту. Зніміть його, застосувавши адекватне зусилля. Не викидайте ковпачок.
- Переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та катализатор) рівномірно видавлюються з картриджа. Для цього злегка натисніть на ручку диспенсера, видавивши незначну кількість матеріалу. Після цього ретельно очистіть носики картриджа.
- Міцно приєднайте змішуючу насадку, сумістивши V-подібний паз на кольоровому обідку змішуючої насадки з відповідною позначкою на картриджі. Далі, застосовуючи деяке зусилля саме до кольорового обідка насадки, а не до частини, в якій відбувається замішування двох компонентів, поверніть його на чверть оберту.
- Тепер пристрій готовий до застосування; видавлюйте матеріал, натискаючи на ручку диспенсера з невеликим зусиллям.
- Після використання зніміть насадку та встановіть на місце ковпачок, як описано вище.
- Для установки нового картриджа дотримуйтеся вищенаведених вказівок від самого початку.

Відбитки, зняті **Prestige A Plus Light**, можна покривати сріблом або міддю у ванночках для гальванізації.

ВАЖЛИВО

Перед зняттям другого відбитку обов'язково промийте та акуратно висушіть перший відбиток. Це забезпечить надійну адгезію між першим та другим шарами матеріалу.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після зняття відбитку його потрібно дезінфікувати для повного видалення дрібних часточок матеріалу та слини. Це можна зробити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним в дезінфікуючий розчин протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через одну годину після зняття відбитку. Стабільність розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії Prestige сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку (наприклад, Hydrocal Kerr® класу III та Fujirock GC® класу IV і т.п.).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності продукту – 3 роки від дати виробництва за умови правильного зберігання. Зберігайте матеріал надійно закритим у прохолодному сухому місці при температурі 4 °C – 28 °C (39 °F – 82 °F). Тримайте подалі від джерел тепла, іскор та відкритого полум'я.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії і термін придатності вказані на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- Уникайте контакту шкіри та очей з каталізатором.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима промийте їх ретельно водою та зверніться до лікаря.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, в тому числі і на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код продукту	Індивідуальна упаковка
055108 Prestige A Plus Light	100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл) + 6 змішувальних насадок