

PRESTIGE PUTTY PRESTIGE PUTTY SOFT - FAST SET

Prestige Putty/Prestige Putty Soft – Fast Set – А-силікони високої в'язкості для зняття відбитків, що характеризуються високою точністю передачі деталей; ідеально підходять для зняття відбитків за двоетапною методикою.

Матеріали **Prestige Putty/Prestige Putty Soft – Fast Set** розроблені для зняття точного першого відбитку за двоетапною методикою; матеріал характеризується особливою м'якістю протягом робочої фази, однак після реакції вулканізації демонструє оптимальну твердість.

Продукти виготовлені згідно з положенням стандарту ISO 4823:

Prestige Putty: Тип 0 дуже високої консистенції

Prestige Putty Soft: Тип 0 дуже високої консистенції

Для використання лише лікарями-стоматологами.

Prestige Putty/Prestige Putty Soft – Fast Set показані для зняття всіх видів відбитків, а саме які використовуються для виготовлення знімних та незнімних протезів та ортодонтичних конструкцій, тимчасових конструкцій і т.п. **Prestige Putty/Prestige Putty Soft – Fast Set** може використовуватися з усіма видами відбиткових ложок. У випадку повної клінічної або часткової адентії рекомендується використовувати систему відбиткових ложок Superform. При використанні неперфорованих відбиткових ложок рекомендується застосовувати універсальний адгезив **Prestige Universal Adhesive**.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Prestige Putty	Prestige Putty Soft – Fast Set
Час замішування*	30 секунд	30 секунд
Робочий час*	2 хвилини	1 хвилина 30 секунд
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини 30 секунд	2 хвилини 30 секунд
Час твердіння*	5 хвилин 30 секунд	4 хвилини
Точність передачі деталей (мкм)	<4	<4
Деформація при стисканні	2%	2%
Відновлення форми	>99,5%	>99,5%
Стабільність розмірів, протягом 24 годин	<0,2%	<0,2%
Твердість	67 А за Шором	56 А за Шором
Колір	Яскраво – рожевий	Персиковий

*Відлік вказаних вище часових параметрів співпадає з початком замішування при температурі 23°C (73°F). Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.

ПІДГОТОВКА

- За допомогою мірних ложок з відповідним кольоровим маркуванням відмірте матеріали з двох банок.
- Співвідношення бази до каталізатора складає 1:1.
- Змішуйте однакові порції базового матеріалу та каталізатора до набуття сумішшю однорідного забарвлення.

УВАГА

- Якщо перед змішуванням каталізатор і база обробляються окремо вручну, час твердіння може збільшитися.
- Одразу закривайте банки каталізатора та бази.
- Не міняйте місцями кришки двох банок; для дозування компонентів використовуйте відповідні їм мірні ложки.
- Не рекомендується користуватися латексними рукавичками.

Відбитки, зняті з **Prestige Putty/Prestige Putty Soft – Fast Set**, можна покривати міддю або сріблом у ванночках для гальванізації.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після зняття відбитку його потрібно стерилізувати для повного видалення дрібних часточок матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним в дезінфікуючому розчині протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається. Точно дотримуйтесь інструкцій виробника.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через 1 годину після полімеризації. Стабільність розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії **Prestige** сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку (наприклад, Hydrocal Kerr® класу III та Fujirock GC® класу 4).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки, зняті з **Prestige Putty/Prestige Putty Soft – Fast Set**, при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності продуктів серії **Prestige** – 3 роки від дати виробництва. Зберігайте матеріал надійно закритим у прохолодному сухому місці при температурі 5 °C – 27 °C (41 °F – 80 °F). Тримайте подалі від джерел високих температур.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії і термін придатності зазначені на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, в тому числі і на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код продукту	Індивідуальна упаковка
055001 Prestige Putty	База 300 мл/450 г + каталізатор 300 мл/450 г
055002 Prestige Putty Soft – Fast Set	База 300 мл/450 г + каталізатор 300 мл/450 г