

Плагер для гутаперчі



**ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ПРОДУКТ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ**

ВИРІБ НЕСТЕРИЛЬНИЙ - СТЕРИЛІЗУВАТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Стоматологічні інструменти для конденсації гутаперчі. Інструменти виготовлені з нержавіючої сталі стійкою до корозії.

ПОВОДЖЕННЯ З ІНСТРУМЕНТАМИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

У процесі виробництва застосовуються процедури, спрямовані на забезпечення стійкості до корозії, але міцність інструментів залежить від правильної експлуатації і технічного обслуговування.

Очищення

Інструменти поставляються нестерильні. Новий інструмент перед першою стерилізацією, після вилучення з упаковки необхідно ретельно вимити в теплій воді з додаванням миючого засобу.

Щоразу перед використанням у іншого пацієнта інструменти повинні бути піддані стерилізації.

Стерилізація

Всі інструменти (багаторазові) повинні бути продезинфіковані, промиті для видалення дезінфекційного засобу і осушені, перш ніж будуть піддані стерилізації. Особливо рекомендується мити ультразвуком, як це найбільш ефективний і продуктивний метод.

Рекомендовані методи стерилізації:

Метод	Рекомендована температура і час
Паровий автоклав	121°C, на 20 хвилин
Сухе повітря	160°C, від 60 до 120 хвилин
Хімічна пара	132°C, на 20 хвилин

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Зверніться до вказівок по очищенню та стерилізації.

ЗБЕРІГАННЯ

Інструменти зберігати при температурі 5-30°C і відносній вологості повітря не більше 70%.

Щоразу перед використанням інструменту перевірте на наявність забруднень, пошкоджень структури матеріалу (тріщини, викривлення, розлом, відшарування).

Недотримання перерахованих вище правил значно знижує термін служби інструменту і скорочує час його використання.

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ:

1. Плагер для гутаперчі розмір 0,6 мм - жовтий
2. Плагер для гутаперчі розмір 0,8 мм - червоний
3. Плагер для гутаперчі розмір 1,0 мм - блакитний
4. Плагер для гутаперчі розмір 1,2 мм - зелений



ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ



PPH CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського,1
тел./факс 0048 15 842-35-85

**Уповноважений
представник в
Україні та адреса:**



Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«ІВОДЕНТ»

вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua

Дата останнього оновлення:
14.02.2018/2