
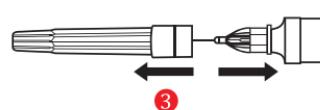
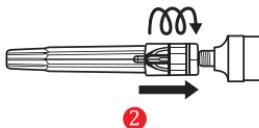


РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Голки стоматологічні одноразового використання С-К ЄСТ СТЕРИЛЬНІ

Спосіб використання

- 1 Розірвіть герметичне з'єднання. (Щоб зняти ковпачок, поверніть його. Не згинайте ковпачок та не намагайтесь його відламати).
- 2 Закріпіть голку на стоматологічному картриджному шприці.
- 3 Перед використанням зніміть захисний ковпачок.

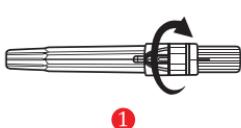

Увага!

- Не використовуйте повторно, щоб не допустити потрапляння інфекції та виникнення несправностей.
- Не згинайте голку.
- Не згинайте голку в місці з'єднання з пластмасовою частиною. Зігнута голка може зламатися всередині тканин та спричинити травму.
- Не згинайте голку кілька разів, навіть під невеликим кутом, під час використання.

Запобіжні заходи під час використання

- Перед використанням ознайомтеся з рекомендаціями з використання.
- Не користуйтесь голкою, якщо герметичне з'єднання вже пошкоджене.
- Скористайтеся голкою одразу після того, як розірвete герметичне з'єднання. До моменту фактичного використання голка має бути всередині захисного ковпачка.
- Щоб викинути голку, скористайтеся захисним ковпачком, і не торкайтесь самої голки, щоб не перенести з неї інфекцію після використання.

Умови зберігання

Не зберігайте в умовахграничних температур, вологості та захищайте від впливу прямих сонячних променів.



ВИРОБНИК: С-К ДЕНТАЛ ІНД. КО., ЛТД.

88-50, Судо-Ро, Пучхон-Сі, Кенгі-До, Корея
Тел.: +82-32-679-1204, факс: +82-32-679-1207

C-K DENTAL IND. CO., LTD.

88-50, Sudo-Ro, Bucheon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Tel.: +82-32-679-1204, Fax: +82-32-679-1207

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ФАРМА КОНСАЛТИНГ»

бул. Дорожна 25, м. Одеса, 65031, Україна

Тел.: +38-048-734-34-00

E-mail: info@pharmaconsulting.com.ua

Дата останнього перегляду рекомендацій: 05.10.2020



UA.TR.101