



## 50/10 GENESI M

**Cod. D-GE150-040-M**

Безмасляный бесшумный компрессор, производительность 120 л/мин, давление 5 бар, ресивер 50 л, с осушителя.


 Максимальное одновременное использование: 2

 Количество единиц: 2

Medical Device CE 0425

осушитель воздуха	производительность по воздуху		FAD при давлении @ 5bar		Двигатель	Напряжение Hz	Ресивер	Уровень шума	Рабочий цикл	max P.	Размер	Вес нетто
да	m <sup>3</sup> /min	l/min	m <sup>3</sup> /min	l/min	kW	230V 50Hz	l	db(A)	50 %	bar	mm	Kg
	0.0064	6.4	0.12	120	1.1		40	65		7	710x410x770	42

### Air delivery performance

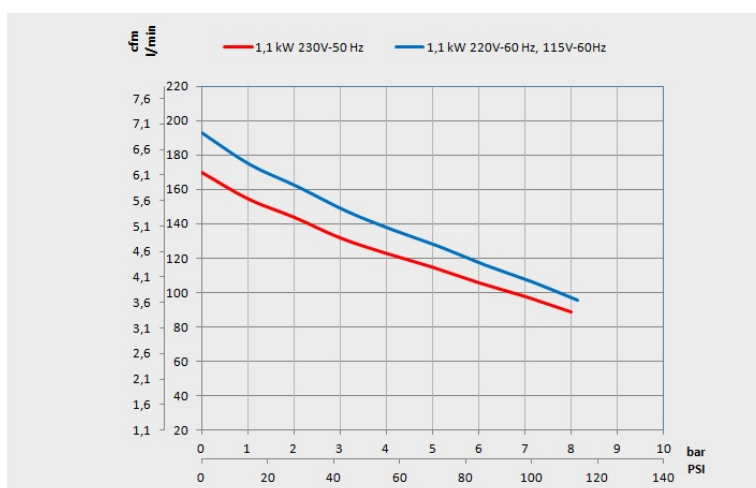

### Комплект для обслуживания

Kit	описание	Тип	Часы
-----	----------	-----	------

TA-FL-024-K-SCC	<p><b>Комплект для планового обслуживания GENESI M</b></p> <p>Обычный комплект для обслуживания компрессоров GENESI с осушителем. Комплект состоит из картриджей фильтрующей батареи осушителя (2 картриджа: 5 + 0,01 мкм) и соответствующих уплотнительных колец, всасывающего фильтра насосного элемента и прокладки обратного клапана. Рекомендуется ежегодная замена компонентов комплекта. Операции технического обслуживания можно выполнять с большей частотой, если среда, в которой работает компрессор, особенно загрязнена.</p>	Обычный	1.000h/1y
MG-GC-011-K	<p><b>Комплект экстренного обслуживания GENESI S и M</b></p> <p>В комплект запасных частей GENESI для экстренного технического обслуживания входят: всасывающий фильтр, два эластичных кольца, уплотнительные кольца, патрон линейного фильтра и две клапанные тарелки в сборе. Рекомендуемые интервалы технического обслуживания для этого компрессора составляют 1500 часов / 2 года. Операции технического обслуживания можно выполнять с большей частотой, если среда, в которой работает компрессор, особенно загрязнена.</p>	Экстраординарный	1.500h/2y