

Orange Guttane



Олія для розчинення гутаперчі
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: 100% апельсинова олія

ПРИЗНАЧЕННЯ

Продукт EUCALYPTOL призначений для використання під час повторного лікування кореневого каналу з метою видалення гутаперчі з кореневого каналу.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Перед використанням піпетка повинна бути занурена у спирт (етиловий спирт).

1. Помістіть 1-2 краплі рідини в канал за допомогою доданої піпетки.
2. Видаліть гутаперчу.
3. При необхідності використовуйте наступну дозу препарату.
4. Нанесіть EUCALYPTOL знову, якщо гутаперча буде сухою і ламкою.
5. Повторювати процедуру до отримання бажаного результату.

Продукт призначений для багаторазового використання, в той час як піпетка повинна бути використана тільки один раз. Багаторазове використання піпеток може становити небезпеку вторинної інфекції.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до інгредієнтів препарату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Препарат може викликати подразнення слизових оболонок ротової порожнини, при контакті промити водою. Продукт подразнює очі. Якщо потрапили в очі, негайно промити великою кількістю води, а потім звернутися до лікаря.

При роботі з препаратом використовувати коффердам, рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності знаходиться на первинній упаковці.

Після відкриття термін дії не змінюється за умов щільного закриття флакона після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ


Порожні контейнери повинні бути утилізовані або повернуті виробникові.

УПАКОВКА

Флакон, що містить 10 мл препарату, аплікаційні піпетки.



PPH CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул.Квятковського, 1
тел/факс 0048 15 842-35-85

| | |
|--|--|
| Уповноважений представник в Україні та адреса: | Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ» |
|  UA.TR.101 | вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua |

Дата останнього оновлення: 22.05.2017/1