

25% ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

MAGIC SMILE

Система Отбеливания Зубов

MAGIC SMILE - комплексная система отбеливания зубов, основанная на гелях - Пероксид Карбамида 44%, Перекись Водорода 25%, Перекись Водорода 38%, LED лампе MagicLight PRO и домашних наборах Magic Smile Home. Процедура отбеливания зубов Magic Smile безопасна и еффективна при использовании согласно инструкции и соблюдении противопоказаний.

Оптимальное отбеливание

Перекись Водорода 25% - это оптимальный гель для отбеливания зубов, который обеспечивает наилучшие результаты не вызывая значительной чувствительности зубов.

Индивидуальные протоколы

Magic Smile поможет Вам выбрать протокол отбеливание и провести индивидуальную процедуру с учетом особенностей зубов пациента.

Полный комплекс отбеливания

Использование домашних наборов Magic Smile после клинического отбеливания обеспечивает наилучшие результаты и создает дополнительные источники дохода для Вашей практики.

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА:

- Двойной шприц 4.5 мл с отбеливающим гелем Перекиси Водорода 25% (1шт)
- Жидкий коффердам MagicDam 3 мл (1шт)
- Гель для укрепления эмали и уменьшения чувствительности 3 мл (1шт)

Рассчитан на несколько пациентов

Набор рассчитан на 3-4 пациента и до 12 нанесений, в зависимости от площади поверхности и количества использованного геля.

Безопасность в использовании

Magic Smile не использует абразивы, кислоты и ультрафиолет. Специальные компоненты снижают чувствительности зубов во время процедуры.

Пролонгированный результат

Соблюдение рекомендованных протоколов и дальнейшее отбеливания домашними наборами Magic Smile обеспечивает результат до 10 оттенков, который держится до 3 лет.

- Тампон с витамином Е (4шт)
- Аппликатор, браш (4шт)
- Насадки канюли (8шт)
- Инструкция

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Храните гель охлажденным при температуре от 4 до 10 С. НЕ перегревайте и НЕ переохлаждайте. Избегайте прямых солнечных лучей.

Протокол Отбеливания с Перекисью Водорода 25%

- **▶ 1 нанесение:** 20 минут с использованием Перекиси Водорода 25%
- **▶ 2 нанесение:** 20 минут с использованием Перекиси Водорода 25%
- ➤ 3 нанесение: 15-20 минут с использованием Перекиси Водорода 25% Всего 3 нанесения¹.

ВНИМАНИЕ: Этот протокол может повысить чувствительность зубов.

ВАЖНО: Этот протокол является базовым для этого набора. Вы можете найти другие рекомендованные протоколы в разделе Рекомендуемые Протоколы Отбеливания.

¹Одно нанесение включает верхнюю и нижнюю челюсть..

ТРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ

Подготовка Нане

- 1. Разместите пациента в кресле и наденьте нагрудник.
- 2. Для увлажнения губ воспользуйтесь тампоном с витамином Е. Возьмите головку с линиями вверх и надломите ее, чтобы жидкость с витамином Е спустилась и смочила противоположный конец тампона, которым смажьте губы пациента.
- 3. Наденьте ретрактор.
- Обязательно зафиксируйте цвет зубов до начала процедуры, чтобы отслеживать динамику отбеливания.
- 5. Проведите механическую чистку зубов пастой без фтора и других минералов.

Нанесение геля

- 6. Изолируйте десневой край жидким коффердамом MagicDam.
- Высушите зубы, отбеливающий гель следует наносить только на сухие зубы.
- Возьмите необходимый шприц с отбеливающим гелем (для получения дополнительной информации см. Протоколы отбеливания) и установите насадку-канюлю для удобства нанесения. Если это двойной шприц, то снимите колпачок и сопоставьте тонкое и толстое отверстие шприца с соответствующими оранжевыми пазами в насадке-смесители и осторожно установите насадку. Прокрутите синий фиксатор по часовой стрелке, чтобы плотно закрепить насадку. При нажатии на поршень гель и активатор будут смешиваться в насадке.
- 9. Нанесите гель тонким слоем (примерно 0.2 мл на каждую челюсть), на переднюю поверхность зубов.
- Используйте браши, слегка втирая гель для более плотного контакта с эмалью.
- 11. Оденьте себе и пациенту специальные очки из комплекта.
- Установите таймер LED лампы на 10 20 минут и направьте свет на зубы. Лампу располагайте максимально близко к зубам пациента, разместив равномерно относительно верхней и нижней челюсти, не касаясь губ.
- 13. После каждого нанесения смывайте гель, высушивайте зубы и наносите гель заново.

Завершение процедуры

- 14. По окончанию процедуры, тщательно промойте ротовую полость, удалите полимеризований коффердам, снимите насадку-канюлю, закройте шприц и спрячьте в холодильник.
- 15. Смажьте витамином E десны и губы пациента.
- Сделайте дополнительные фотографии для фиксации результата и оценки результата процедуры.
- 17. Нанесите гель для реминерализации и снятия чувствительности на 30 минут.
- 18. Смойте гель.

Комплексный подход дает наилучший результат и закрепляет эффект надолго.

ВАЖНО: Общее время действия отбеливающего геля не должен превышать 1 часа. При необходимости, сделайте еще 1 или 2 нанесения отбеливающего геля, но не ранее следующего дня.

ПРИЕМ ПИЩИ И ЖИДКОСТИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ: Не рекомендуем есть ли пить в течение 4 часов после отбеливания.

Продолжение комплекса отбеливания

Для достижения максимальных и продолжительных результатов рекомендуем использовать домашние наборы Magic Smile (с гелем Пероксид Карбамида 25%) через 10-15 дней после процедуры клинического отбеливания зубов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОТОКОЛЫ ОТБЕЛИВАНИЯ

Протокол «MagicSmile»

Оптимальный протокол, для баланса между чувствительностью зубов и максимальным результатом отбеливания.

Вариант А

- ▶ 1 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
- **▶ 2 нанесение:** 20 минут с использованием Перекиси Водорода 25%
- **▶ 3 нанесение:** 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%

Всего 3 нанесения².

Вариант Б

- **▶ 1 нанесение:** 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
- **▶ 2 нанесение:** 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
- **▶ 3 нанесение:** 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%

или 20 минут с Перекисью Водорода 25%

Всего 3 нанесения².

Протокол «Maximum»

Самый сильный протокол для достижения максимальных результатов.

- ▶ 1 нанесение: 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
- **▶ 2 нанесение:** 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%
- **▶ 3 нанесение:** 10-15 минут с использованием Перекиси Водорода 38%
- ► **4 нанесение:** 10 минут с использованием Перекиси Водорода 38%

Всего 3 нанесения².

ВНИМАНИЕ: Этот протокол может повысить чувствительность зубов.

Протокол «Gentle»

Протокол разработан для пациентов с повышенной чувствительностью зубов.

- **▶ 1 нанесение:** 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
- **▶ 2 нанесение:** 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%
- **▶ 3 нанесение:** 20 минут с использованием Пероксид Карбамида 44%

Всего 3 нанесения².

ВАЖНО: При необходимости, процедуру можно разделить на 3 дня, чтобы уменьшить риск повышения чувствительности.

²Одно нанесение включает верхнюю и нижнюю челюсть.

РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

Когда применять?

- Для максимально эффективной реминерализации, гель лучше использовать на следующий день после отбеливания.
- Для уменьшения чувствительности рем. терапию лучше провести сразу после отбеливания.

Мы рекомендуем использовать реминерализирующую терапию после каждой процедуры отбеливания, чтобы уменьшить чувствительность и повысить насыщенность эмали минералами.

- 1. Разместите пациента в кресле, наденьте нагрудник и ретрактор.
- 2. Нанесите гель на чистые, сухие зубы на 30 минут тонким слоем по 0.3 мл каждую челюсть. Не используйте лампу для активации геля.
- 3. Удалите остатки геля ватным тампоном и не полощите рот.
- 4. В течение 2 часов нельзя есть и пить.

MAGICDAM, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Во избежание ожогов и повреждения десен рекомендуем использовать жидкий коффердам. Жидкий коффердам MagicDam имеет контрастный синий цвет, обладает достаточной силой для создания барьера и в то же время легко удаляется.

- 1. Проведите подготовку к процедуре отбеливания.
- 2. Возьмите шприц MagicDam и установите насадку-канюлю для удобства нанесения.
- 3. Для усиления адгезии тщательно просушите зубы и десны.
- 4. Нанесите жидкий коффердам слоем 1.5-2 мм толщиной на десневой край. Материал должен немного закрывать шейки зубов, но не более 0.5 мм эмали и входить в межзубное пространство. Также можно закрывать дефекты зуба: клиновидные деффекты, истирание, глубокие трещины и сколы. После нанесения материал полимеризуется последовательной засветкой по 15-20 сек. с помощью стандартной фотополимерной лампы.
- 5. После процедуры подденьте затвердевший коффердам за краешек и удалите его.
- 6. Закройте шприц MagicDam и храните его в темном и прохладном месте.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отбеливание не рекомендуется пациентам:

- До 18 лет.
- С нереалистичными ожиданиями.
- С кариесом, болезнями эмали или десен или инфекциями зубов / полости рта.
- С повышенной чувствительностью зубов, трещинами, обнаженной шейкой зубов или эрозией.
- С ГЭРБ или у которых повышенная кислотность, что приводит к слабой эмали или повышенной чувствительности.
- Со значительным уменьшение эмали в результате патологической или возрастной стираемости.
- Беременным или кормящим.

Композитные материалы и стоматологический цемент, смешанные с естественной структурой зубов, не отбеливаются.Реставрации, коронки и виниры не отбеливаются и могут потребовать замены после отбеливания.

РЕЖИМ ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ОТБЕЛИВАНИЯ

Для продолжительного результата отбеливания, в течение 3 дней после процедуры, избегайте:

- Продукты, содержащие красители
- Курения
- Слишком горячих или холодных продуктов
- Помад и блеска для губ
- Любые продукты или напитки, которые могут оставить пятно на белой рубашке
- Цветные пасты и ополаскиватели.

Мы рекомендуем придерживаться «Белой диеты» не менее двух недель после процедуры отбеливания зубов. Это обеспечит наилучшие результаты и устранит нежелательную окраску зубов.

«БЕЛАЯ ДИЕТА»

Отказ от блюд. продуктов и напитков, содержащих большое количество красителей:















Кофе, чай и напитки на их основе

Соки, вина, морсы, лимонады

Шоколад, другие блюда и напитки, содержащие какао

Овощи, фрукты и ягоды, Кетчуп, аджика и которые способны вызвать окрашивание (свекла, вишня, черника)

другие цветные соусы, пряности Продукты, содержащие Цветные пасты большое количество

кислот (цитрусовые, ополаскиватели

газированные напитки, СМУЗИ)

ВНИМАНИЕ: Если в течение этого срока вы все же съели или выпили что-то, что способно окрасить эмаль необходимо как можно быстрее почистить зубы или воспользуйтесь пастой-пеной MagicSmile Foam.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Гель для отбеливания зубов:

Отбеливающий гель:

Перекись водорода, Цитрат калия, Глицерин, Деионизированная вода, Пропиленгликоль, Карбомер, Карбоксиметил, Поливинилпирролидон, Ментол, Триэтаноламин.

Активатор:

Деионизированная вода, Глицерин, Пропиленгликоль, Карбомер, Гидроксид Натрия, Глюконат железа, пищевой пигмент.

Гель для укрепления эмали и уменьшения чувствительности:

Цитрат Калия, Хлорид Магния, Глицерофосфат Кальция, Глицерин, Деионизированная Вода, 1,2пропандиол, Карбомер, Поливинилпирролидон, Полоксамер-407, Ментол, пищевой пигмент.

Жидкий коффердам MagicDam:

Диуретан диметакрилат, 4-Метакрилоксиетилтримеллитовий ангидрид, Диоксид кремния, Диоксид титана, Инициаторы полимеризации, Сахарин Натрия, пищевой пигментВідбілювання відбувається до природного кольору і не змінює природний колір зубів

Отбеливание происходит до естественного цвета и не меняет естественный цвет зубов.

Может быть нанести вред, если проглотить гель в больших количествах. Храните в недоступном для детей месте.

Избегайте контакта геля с глазами или кожей. Если произойдет контакт, вытрите гель и тщательно промойте водой.

Эта система отбеливания зубов предоставляется без гарантий и обязательств. Корпорация Magic Smile не дает никаких гарантий, связанные с этим продуктом, явных или неявных, включая, но не ограничиваясь гарантии товарного вида, пригодности для определенной цели или не нарушать права третьих сторон. Использование продукта пользователем является риском пользователя.