

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИБІР ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

SILAN наноситься на кераміку після протруєння перед застосуванням системи адгезії для підвищення міцності зв'язку між смолами та керамікою.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

1. Приєднати аплікатор з пензликом на шприц з сіланом.
2. Втерти сілан у протруєну раніше поверхню кераміки.
3. Не промивати! Висушити струменем повітря.
4. Поверхня кераміки готова до використання адгезивних систем.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

У разі проведення ремонтних робіт в порожнині рота пацієнта обов'язково використовувати кофердам, та захистити очі пацієнта. Застосовувати відсмоктування повітря в процесі травлення. Використовувати захисний одяг, рукавички, та захисний щиток. Може чинити подразнювальну дію на очі, дихальні шляхи і шкіру. У випадку контакту з очима промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. У разі подразнення шкіри: змити милом і великою кількістю води. У разі проковтування не викликати блювоту, звернутися до лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C.

Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності зазначено на упаковці.

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ


Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові.

УПАКОВКА

Шприц, що містить 2 мл препарату, аплікатори одноразові.



CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

<p>Уповноважений представник в Україні та адреса:</p>	<p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»</p>
	<p>вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: info@ivodent.com.ua www.ivodent.com.ua</p>