




Збираємо ящики

А. Прикручуємо передні панелі самонарізним гвинтом DIN 7981 3,5x9,5, підкладаємо під нього шайбу 3x8

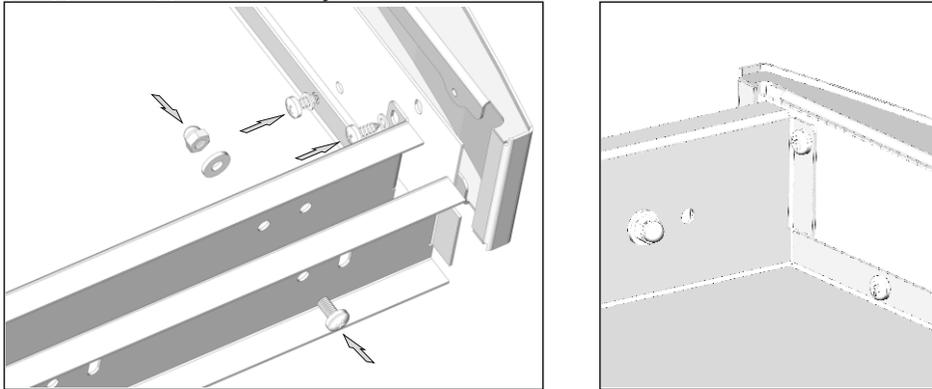


Б. Прикручуємо направляючі телескопічні (попередньо роз'єднавши їх), ставимо по 2 гвинта M4x6 та 2 гайки M4 ковпачкові, на одну сторону, всього 4 гвинта та 4 гайки на ящик.

Увага: для того, щоб роз'єднати телескопічні направляючі або зняти ящик, треба: натиснути на пластикові вуса направляючої з кожної сторони, та потягнути на себе.

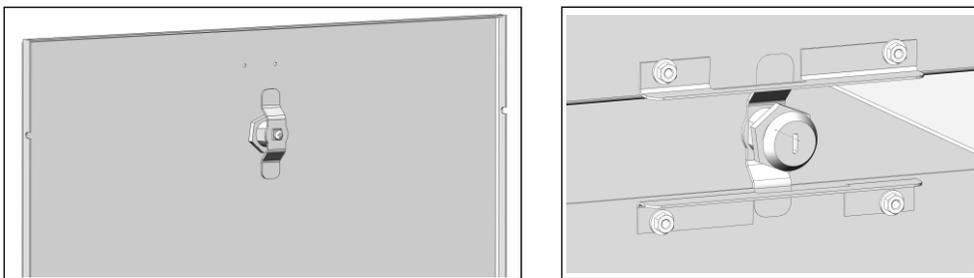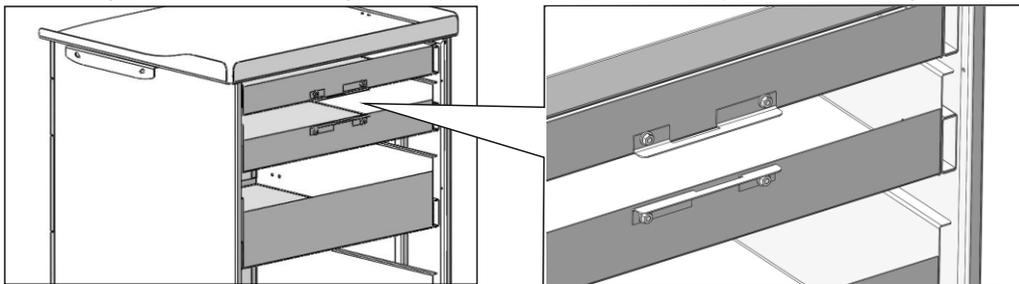

В. Замок на 2 верхніх ящика: видаляємо заглушку (замок це додаткова опція, замовляється окремо)  встановлюємо замок

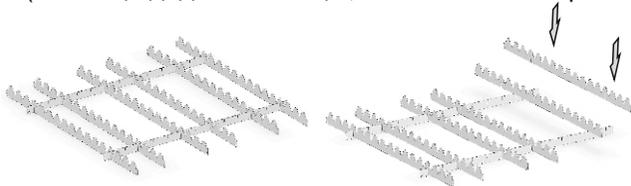

Г. Решітка металева, фарбована (це є додаткова опція, замовляється окремо)

Скануйте QR код – щоб переглянути відео по складанню тумби.



TANGO



Керівництво по складанню тумби Танго

Увага! Для кваліфікаційного персоналу

Мобільна тумба, повністю з металу, повністю розбірна конструкція, з 6 або 7 висувними шухлядами на повну довжину.


Цифри у дужках (), комплектація для Танго 7

	x37 80L Самонарізний гвинт 4,2 x 13 цб нпкр бургт PH		x6 (7) (комплекта) Ролик на площадці з гальмом без гальма														
	x50 (60) DIN 7981 Самонарізний гвинт 3,5x9,5		x2														
	x24 (28) DIN967 Гвинт M4x6 бургт цб PZ+PL		x2														
	x50 (60) Шайба плоска 3x7 цб	<table border="1" data-bbox="1702 1117 1926 1484"> <tr><td>h 60 mm</td></tr><tr><td>h 88 mm</td></tr><tr><td>h 88 mm</td></tr><tr><td>h 60 mm</td></tr><tr><td>h 88 mm</td></tr><tr><td>h 150 mm</td></tr><tr><td>h 150 mm</td></tr><tr><td>h 190 mm</td></tr></table>	h 60 mm	h 88 mm	h 88 mm	h 60 mm	h 88 mm	h 150 mm	h 150 mm	h 190 mm	<table border="1" data-bbox="1926 1117 2172 1484"> <tr><td>h 60 mm</td></tr><tr><td>h 88 mm</td></tr><tr><td>h 88 mm</td></tr><tr><td>h 150 mm</td></tr><tr><td>h 150 mm</td></tr><tr><td>h 190 mm</td></tr></table>	h 60 mm	h 88 mm	h 88 mm	h 150 mm	h 150 mm	h 190 mm
h 60 mm																	
h 88 mm																	
h 88 mm																	
h 60 mm																	
h 88 mm																	
h 150 mm																	
h 150 mm																	
h 190 mm																	
h 60 mm																	
h 88 mm																	
h 88 mm																	
h 150 mm																	
h 150 mm																	
h 190 mm																	
	x32 (36) Шайба плоска 4x9 цб																
	x16 Шайба плоска 4x12 цб																
	x24 (28) DIN1587 гайка M4 ковпачкова 5 цб																



T7

T6

1. Прикручуємо 4 ролики самонарізним гвинтом 80L 4,2x13 мм., підкладаємо шайбу 4x12

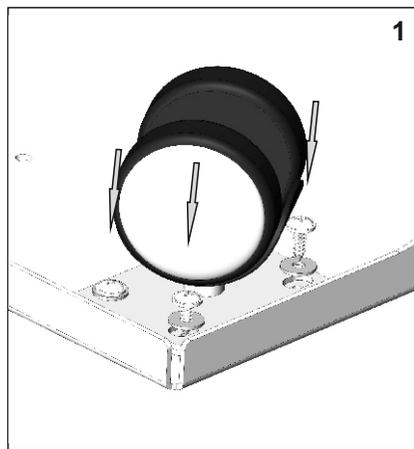


2. Прикручуємо направляючі телескопічні: самонаріз DIN 7981 3,5x9,5 мм, підкладаємо шайбу 3x7. Танго 6 - 1,2,3,5,6,7 для Танго 7 - 1,2,3,4,5,6,7 отвори

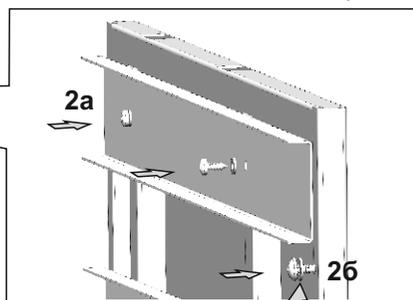
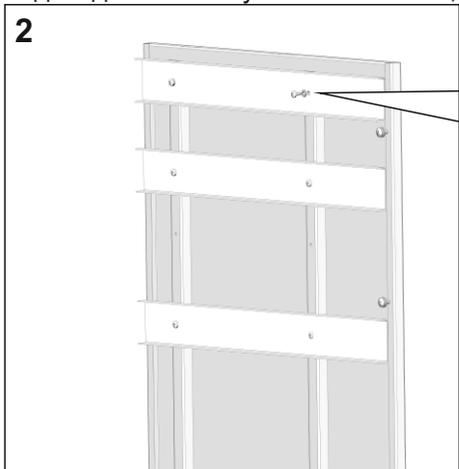


26. Наживляємо (але не закручуємо, див. мал.) самонаріз 80L 4,2x13 плюс шайба 4x10, для задньої стінки

3. Прикручуємо праву, ліву, та задню стінки, самонарізним гвинтом 80L 4,2x13 мм., попередньо не затягуючи кріплення.

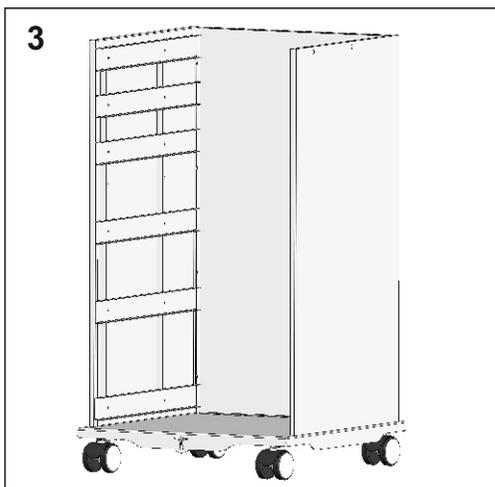

4. Ставимо шухляди, перевіряємо рівномірність (плавність) їх руху, centruємо тумбу, та затягуємо кріплення

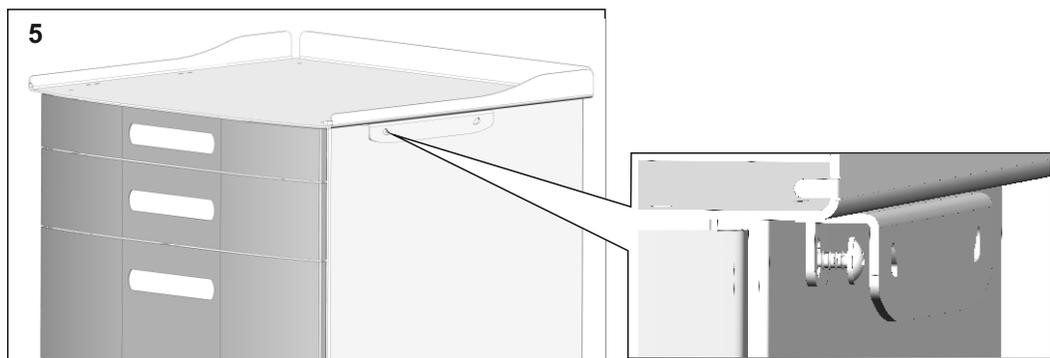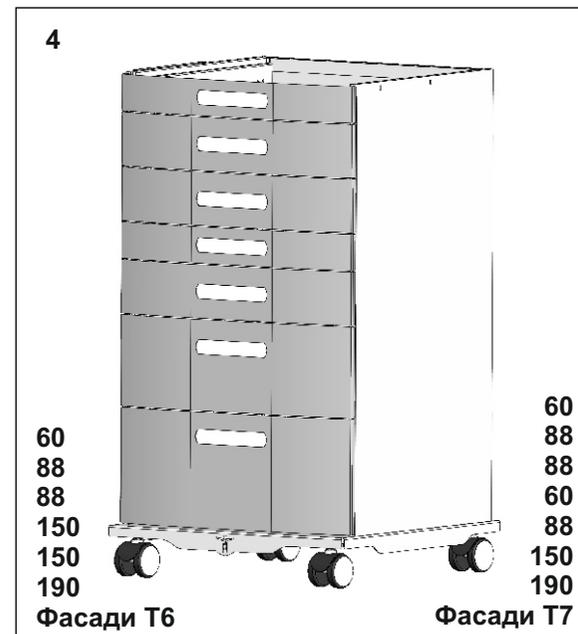

5. Прикручуємо ручки з верхньою полицею самонарізним гвинтом 80L 4,2x13 мм.