

ТЕХНІКА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРИЗНАЧЕННЯ	- Ефективно видаляє біоплівку та біологічні утворення. - Концентрат засобу для чищення з непомітним піноутворенням - Високий ступінь очищення та безпека до матеріалів системи аспірації - Пролонгований вплив до нових утворень
ТИП ПРОДУКТУ	Безпечний чистячий концентрат для очищення системи аспірації стоматологічної установки і всієї дренажної системи.
ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ	- Очищувач всмоктувального пристрою є безпінний концентрат. - Очищення стоматологічних аспіраторів, в залежності від і на розсуд фахівців у стоматологічній практиці від обсягу навантаження і кількість біовідходів. - Регулярне використання унеможливорює накопичення твердих біоплівок і продовжує роботу вакуумної помпи.
ЧАС ЕКСПОЗИЦІЇ:	1-30 хв залежно від забруднення системи.

ЗАЯВА:

Спеціальний засіб для чищення використовується після використання стоматологічного обладнання .

āSPER-C ml	Вода ml ≈20 °C	Готовий розчин ml
50	950	1000
100	1900	2000
30	970	1000

СКЛАД:

Відповідає аркушу безпеки:

<25%Неіонні поверхнево-активні речовини

<5% комбінація органічних кислот

Хіміко-фізичні дані

Щільність: 1,2 г/см³

Значення рН '10 при 20°C: <2

Зовнішній вигляд: бурштиново-жовтий

1 літр 50 мл – 950 мл

2 літри 100 мл 1900 мл

1 литр 30 мл –970 мл

2 литра 60 мл-1940

ТУ У 20.2-42462243-001:2018

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Використовуйте захисні рукавички, окуляри.

У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: Ретельно промийте очі протягом декількох хвилин.

Якщо роздратування очей зберігається: зверніться до лікаря.



EZMEDIX