

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

CERAMIC PRIMER II

ПРАЙМЕР ДЛЯ БОНДИНГУ КЕРАМІКИ ТА КОМПОЗИТІВ

CERAMIC PRIMER II — це праймер, призначений для обробки поверхні керамічних та композитних протезів з метою забезпечення надійного бондингу до матеріалів на основі смол: цементів у випадку фіксації або композитів у випадку ремонту реставрацій.

Для використання лише стоматологами та зубними техніками для цілей, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

1. Обробка праймером поверхонь непрямих реставрацій, виготовлення з кераміки (склокераміки, оксиду цирконію та оксиду алюмінію), гібридної кераміки (наприклад, CERASMART) та композитів перед фіксацією.
2. Внутрішньоротовий та позаротовий ремонт непрямих реставрацій, виготовлених з кераміки, гібридної кераміки та композитів, котрі мають сколи.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

У поодиноких випадках цей продукт може викликати чутливість у деяких людей. Якщо таке трапиться, припиніть його використання та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ

I. Для проведення фіксації

1. Обробіть адгезивні поверхні, згідно з відповідними інструкціями виробника, а потім очистіть його, застосовуючи прийнятний метод очистки. Ми рекомендуємо очищувати його в ультразвуковій ванні або з допомогою спирту з подальшим промиванням та висушуванням його повітрям, що не містить домішок мастила.
2. **Пляшечка:** Помістіть одну краплю CERAMIC PRIMER II у ємність для змішування.
Унідоза: Відкрутити кришечку проти годинникової стрілки. Перед цим необхідно впевнитися, що верх та низ капсули розташовані відповідно.
3. Нанесіть тонкий шар на адгезивну поверхню **керамічного або композитного протезу** застосовуючи, наприклад, аплікатор, та висушіть струменем повітря.
4. Нанесіть відповідний композитний цемент для фіксації на поверхню протезу, оброблену праймером. Для здійснення цих кроків дотримуйтеся інструкцій з використання від виробника фіксуючого цементу.

II. Для внутрішньоротової корекції

1. Використовуючи алмазний бор грубої зернистості або карборундову голівку, загрубити адгезивну поверхню кераміки чи композиту, **що призначена для бондингу.**
2. **Обробіть адгезивні поверхні протезу, призначені для бондингу** згідно з відповідними інструкціями виробника, а потім очистіть його, застосовуючи прийнятний для цього метод очистки. Промийте та висушіть струменем повітря без домішок мастила.
3. **Пляшечка:** Помістіть одну краплю Ceramic Primer II у ємність для змішування.
Унідоза: Відкрутити кришечку проти годинникової стрілки. Перед цим необхідно впевнитися, що верх та низ капсули розташовані відповідно.

4. Нанесіть тонкий шар на по верхню сколу керамічного або композитного протезу, застосовуючи, наприклад, аплікатор, та висушіть струменем повітря.
5. Продовжуйте ремонт реставрації із застосуванням адгезиву світлового твердіння (наприклад, G-aenial Bond) та композиту світлового твердіння (наприклад, G-aenial), звертаючись до відповідних інструкцій з використання від виробника.

Примітка: У разі потрапляння слини або крові на оброблену **адгезивну поверхню** промийте її водою та висушіть. Повторно обробіть поверхню згідно інструкцій виробника, та повторно нанесіть CERAMIC PRIMER II згідно із наведеними вище інструкціями.

ЗБЕРІГАННЯ

Для досягнення оптимальних результатів застосування рекомендується зберігати матеріал при кімнатній температурі (4-25°C, 39.2-77.0°F). Тримати подалі від прямих сонячних променів. Термін придатності 2 роки від дати виробництва.

УПАКОВКА

1. CERAMIC PRIMER II, 1 пляшечка 3 мл
2. CERAMIC PRIMER II, 10 x унідоза 0.1 мл

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. CERAMIC PRIMER II є легкозаймистою та летючою речовиною. Не використовуйте поблизу джерел відкритого вогню. Тримайте подалі від джерел займання. Зберігайте подалі від прямих сонячних променів. Використовуйте у добре провітрюваних приміщеннях.
2. У випадку потрапляння матеріалу на слизову оболонку ротової порожнини негайно видаліть його ватним тампоном або губкою. Промийте одразу ж після завершення фіксації або ремонту реставрації.
3. У випадку потрапляння матеріалу на шкіру негайно видаліть його ватним тампоном або губкою. Промийте водою з милом.
4. У випадку потрапляння в очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
5. Відразу ж після використання закрити пляшку кришечкою. Якщо на пляшечці з CERAMIC PRIMER II утворився конденсат, одразу ж витріть його.
6. Унідоза призначена для одноразового використання. **Задля запобігання перехресному інфікуванню пацієнтів, не закривати кришечкою та не використовувати повторно.**
7. У разі якщо кришечка уніدوزи занадто щільно закручена, не рекомендується докладати надмірних зусиль задля уникнення випадкового потрапляння рідини на шкіру та очі. Замість цього слід використовувати іншу унідозу.
8. Не допускайте проковтування матеріалу.
9. Не змішуйте з іншими праймерами.
10. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

Деякі із згаданих в даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарактеризовані, як небезпечні згідно GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, які можна завантажити за наступним посиланням:

<http://www.gceurope.com>

Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника.

Останні зміни внесено: 6/2016