


GC FUJIROCK EP CLASSIC

ПОКРАЩЕНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ГПС ІV КЛАСУ

ПОРОШОК 12 КГ


GC

GC EUROPE N.V.
INTERLEUVENLAAN, 13
LEUVEN, BELGIUM

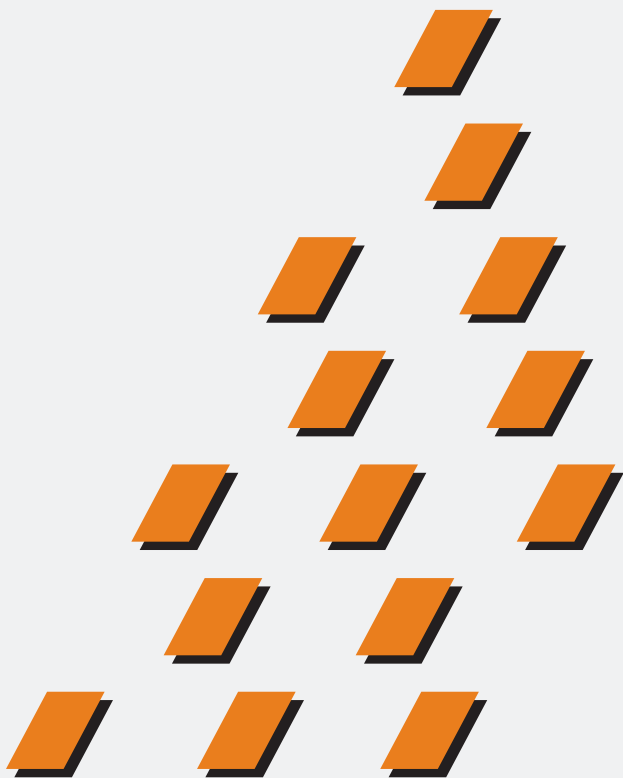

Інструкція з використання


Співвідношення Порошок / Рідина

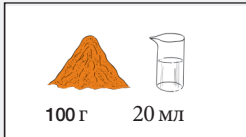


Час змішування



Використовуйте вібростолік під час заливки моделі

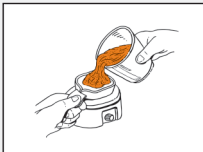

Час видалення з відбитку

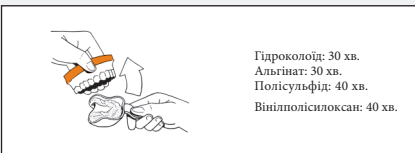

Примітки


1. Зберігати у прохолодному сухому місці в щільно закритому контейнері. Гіпси псуються під впливом повітря, особливо при підвищеній вологості.
2. Використовуйте дистильовану воду для отримання оптимальних фізичних властивостей.
3. Не вдихайте пил.
4. У разі контакту з очима, негайно промити водою.
5. Під час різання та обрізки використовуйте захисні окуляри.
6. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

GC FUJIROCK EP CLASSIC

ISO 6873: Physical Data

Метод тестування: вологість 50%, 23°C (73.4° F) та дистильована вода

Час твердіння	10 - 13 хв.
Коефіцієнт розширення при твердінні (2 години)	0,09%
Міцність на стиснення (1 година)	≈ 53 МПа

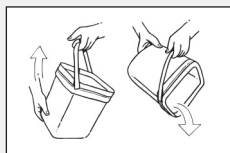

MANUFACTURED BY :

GC EUROPE N.V.

B-3001 Leuven

DISTRIBUTED BY :

GC EUROPE N.V.

B-3001 Leuven

GC AMERICA INC.

Alsip, IL 60803 USA

GC ASIA DENTAL PTE LTD.

Singapore 508724

T0400



PP

MADE IN E.U.