

Endo-Prep CREAM



Крем для обробки кореневих каналів

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ

ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

СКЛАД: етилендіамінтетраоцтова кислота (ЕДТА 15%), перекис карбаміду 10%, допоміжні речовини.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Препарат застосовується для хімічно-механічної обробки кореневих каналів. Вміст у препараті ЕДТА сприяє усуненню солей кальцію із кальцінованих каналів та пульпи, дозволяючи швидкому очищенню та формуванню каналів. У поєднанні з гіпохлоритом натрію діє відбілююче на змінений колір зуба після некрозу. У результаті реакції пероксиду карбаміду із NaOCl виникає велика кількість піни, що дозволяє усунути частини пульпи та дентину з опрацьованого каналу. Пропіленгліколь полегшує проникнення інструмента до каналу і мінімізує можливість поломки інструмента у каналі.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням слід занурити аплікатор, що додається у спирт (етиловий спирт), а потім приєднати до шприца. Після відкриття каналу промийте його з гіпохлоритом натрію.

Заповнити канал зуба за допомогою доданого аплікатора або помістити препарат безпосередньо на ендодонтичному інструменті. Під час механічної обробки каналу промивати гіпохлоритом натрію. Ретельно вимивайте препарат з каналів і пульпової камери розчином гіпохлориту натрію, до тих пір, коли він не припинить спінування. Продукт призначений для повторного використання, в той час як аплікатор повинен бути використаний тільки один раз. Повторне використання аплікатора може становити небезпеку вторинної інфекції.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не слід використовувати у пацієнтах з підвищеною чутливістю до інгредієнтів. Не залишайте препарат в каналі або в пульповій камері між візитами. Це може призвести до надмірного розм'якшення дентину.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Необхідно дотримуватися особливої обережності при розробці каналу в безпосередній близькості до анатомічного отвору, так як це може призвести до перфорації кореневого каналу за допомогою інструменту. Може викликати подразнення очей і шкіри. У разі контакту промити великою кількістю води. Якщо подразнення не проходять, зверніться до лікаря. При попаданні всередину не викликайте блювоту. Пийте багато води. Зверніться до лікаря. При роботі з препаратом використовуйте коффердам. Одягайте рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

ЗБЕРІГАННЯ


Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 2-15°C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності при зберіганні знаходиться на первинній упаковці. Після відкриття термін дії не змінюється за умови ущільненого закривання після кожного використання

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ

Порожні упаковки повинні бути утилізовані або повернуті виробникові.

УПАКОВКИ

Шприц, що містить 2 мл, 5 мл або 10 мл препарату, одноразові аплікатори..

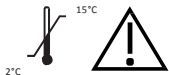

PPH CERKAMED Войцех Павловські
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковського 1
тел/факс 0048 15 842-35-85

Уповноважений
представник в
Україні та адреса:



UA.TR.101

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІВОДЕНТ»

вул. Курінного Чорноти, 2,
корпус 1, м. Івано-Франківськ,
76018, Україна;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua

Дата останнього оновлення: 16.09.2016/4