

# ENDO-SOLution PREMIUM



Рідина для розширення кореневих каналів

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ  
ВИРІБ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЬКИ ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ

**СКЛАД:** динатрію едетат (ЕДТА 17%), поверхнево активні речовини, вода фармацевтичної якості, допоміжні речовини.

## ПРИЗНАЧЕННЯ

ENDO-SOLUTION PREMIUM застосовується для хіміко-механічної обробки кореневих каналів. Препарат відновлює прохідність і прискорює очищення каналу, видаляє змащений шар, відкриваючи гирла дентинних каналців. Динатрію едетат (ЕДТА), що міститься в препараті вимиває іони кальцію і магнію, що призводить до розм'якшення поверхневого шару дентину, полегшуючи його усунення та очищення каналу.

Адаптер з кришкою для забору препарату в шприц.

1. Відкрутіть ковпачок пляшки.
2. Прикрутіть адаптер до пляшки.
3. Для використання зніміть синій ковпачок, закріпіть кінець шприца в отвір адаптера, нахилити пляшечку з препаратом догори дном і наберіть у шприц рідину, утримуючи адаптер. Потім встановіть пляшку на стіл у вертикальному положенні та обережно витягніть шприц з рідиною з адаптера. Рекомендується використання шприців luer-lock з гумовим поршнем.
4. Після кожного використання закрийте адаптер синьою кришкою.
5. Для транспортування видаліть адаптер і закрийте пляшку кришкою.

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Для відновлення прохідності кореневого каналу ввести в канал 2-3 краплі рідини ENDO-SOLUTION PREMIUM, одночасно виконуючи механічну обробку каналу близько 30 с. Промити фізіологічним розчином солі. Повторити дію кілька раз.

Рекомендується полоскання з гіпохлоритом натрію (CHLORAXID).

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Не залишайте препарат в каналі і в порожнині зуба до наступного прийому. Це може призвести до надмірного розм'якшення дентину.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Слід дотримуватися особливої обережності при застосуванні у зонах перфорації. Препарат може діяти дратівливо на очі і шкіру. У разі контакту промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. У разі вживання не викликати блювоту.

Випити велику кількість води. Зв'язатися з лікарем. При роботі з продуктом використовувати коффердам. Використовувати рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.

ДОЗАТОР НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ!

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності вказано на первинній упаковці. Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання.

## ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКОЮ ВИРОБА


Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові.

## УПАКОВКА

Пляшечка, що містить 120 мл препарату, адаптер з кришкою, дозатор.



CERKAMED Войцех Павловські  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул.Квятковського, 1  
тел/факс 0048 15 842-35-85

|  |  |
|--|--|
| <b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b>  | Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»  |
| <br>UA.TR.101 | вул. Курінного Чорноти, 2,<br>корпус 1, м. Івано-Франківськ,<br>76018, Україна;<br>phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55<br>e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a><br><a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a> |