

# BOSTON GLAZE

ГЛАЗУР ДЛЯ КОМПЗИТИВ



ARKONA

## **MD** Медичний виріб класу IIa

### ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

BOSTON GLAZE призначена для отримання характерних для зубів блиску та гладкості всіх видів реконструктивних робіт. Може застосовуватись для матеріалів хімічного та світлового затвердіння а також склоіономерів при виконання таких робіт: пломбування, inlay/onlay, коронки, мости та шини для стабілізації зубів. Особливо рекомендується застосовувати як останній шар протетичних робіт, виконаних з композитів для постійних реставрацій.

### ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготовка поверхні для BOSTON GLAZE не вимагає застосування адгезивної системи.
2. Очистіть та осушіть поверхні, призначені для глазурування. У випадку сильно забруднених поверхонь, нанесіть ETCHMASTER. Застосування BOSTON GLAZE не вимагає попереднього вирівнювання поверхні. BOSTON GLAZE уможливіє отримання гладких і блискучих поверхонь без їх механічного полірування.
3. Рівномірно нанесіть BOSTON GLAZE по всій поверхні реставрації. У випадку нанесення шару, товщиною більше 0,5 мм, можлива зміна кольору на більш жовтий.
4. Опромінюйте згідно таблиці полімеризації.

### ТАБЛИЦЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Лампа	Час опромінення
Halogen/LED (500-800 мВт/см <sup>2</sup> )	40 с
LED (>800 мВт/см <sup>2</sup> )	30 с

### СКЛАД

Суміш диметакрилових смол (BisGMA, BisEMA, HEMA) з додаванням каталізаторів, інгібіторів, системи фотоініціації (CQ : DMAEMA).

Затвердіння BOSTON GLAZE відбувається шляхом вільнорадикальної полімеризації, активованої видимим світлом синього кольору (400–500 nm).

### ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати BOSTON GLAZE у пацієнтів з вираженою чутливістю на будь-який компонент матеріалу.

### ПОБІЧНА ДІЯ

Побічна дія матеріалу BOSTON GLAZE не була виявлена, однак, у осіб з підвищеною чутливістю не можна виключити виникнення ознак алергії. При проявах алергічної реакції негайного типу, слід припинити застосування матеріалу. При проявах віддаленої алергічної реакції, слід замінити реконструкцію.

## **ОБМЕЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ, ВЗАЄМОДІЯ**

Не застосовувати у випадку, коли неможлива повна ізоляція роботи від вологи, слини чи крові. Забруднення можуть порушити процес полімеризації. Не допускати прямого контакту з матеріалами, що містять фенолові сполуки, зокрема з евгенолом або тимолом. Ці сполуки можуть порушувати процес полімеризації BOSTON GLAZE.

## **ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

Уникати контакту неполімеризованого матеріалу зі шкірою, м'якими тканинами ротової порожнини та очима. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води. У разі виникнення відчуття недуги, звернутися за медичною допомогою та надати інформацію про продукт. Для мінімізації ризику контакту під час роботи застосовувати особисті захисні засоби, такі як рукавички, маска на обличчя і окуляри.


При потраплянні препарату до шлунково-кишкового тракту чи дихальних шляхів слід негайно звернутися до лікаря. Для ізоляції робочого поля та захисту пацієнта рекомендовано застосовувати кофердам.

Необхідно подбати про правильне опромінення полімеризаційною лампою, особливо у важкодоступних місцях. Слід переконатися, що під час полімеризації весь шар BOSTON GLAZE пронизується світлом. Неполімеризований композит може викликати алергічні реакції у пацієнта. У випадку забруднення неполімеризованої BOSTON GLAZE потрібно усунути забруднений шар матеріалу і внести наступний, правильно опромінити.

Уникати забруднення поверхні флакону і крапельниці (ризик перехресного зараження).

Для уникнення випадкової полімеризації BOSTON GLAZE закривати флакон відразу після використання.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

 Зберігати у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці. Зберігати у захищеному від світла місці. Полімеризація композиту може розпочатись в оточуючому світлі.

Не перегрівати. Не заморожувати.

Застосовувати відповідно до інструкцій виробника.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

## **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати при температурі не вище 25°C. Не наражати на безпосередню дію сонячного світла.

У разі зберігання при зниженій температурі, перед використанням BOSTON GLAZE необхідно довести до кімнатної температури.

Продукт призначений виключно для стоматологів і зубних техніків.

## **ГАРАНТІЯ**

Фірма АРКОНА дає можливість заміни або повернення вартості товару, у випадку підтвердженої вади.

Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправильного чи неналежного використання матеріалу.

Дата останньої актуалізації інструкції: 08.03.2021



Ексклюзивний дистриб'ютор:  
Альпен Фарма АГ  
Берн, Швейцарія



Уповноважений представник в Україні:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НАТУРФАРМ» (ПрАТ «Натурфарм»)  
04075 Україна, Київ, Пуща-Водиця,  
вул. Лісна 30-А, Тел. (044) 401-81-03



**ARKONA**

АРКОНА Лабораторія Стоматологічної Фармакології Гжегож Кальбарчик  
Насутув 99С, 21-025 Немце, Польща  
www.arkonadent.com