

COLORANT

ТЕКУЧИЙ КОМПЗИТ



MD Медичний виріб класу ІІа

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

COLORANT використовується для місцевого збільшення інтенсивності кольору композитних протетичних робіт і композитних пліомб. Доступний у кольорах білому, ясенному, а також А, В, С (різні ступені інтенсивності коричневого кольору).



Білий



Ясенний



А



В



С

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Тонкий шар COLORANT нанести на ту частину робочого місця, де збільшення інтенсивності кольору покращить естетику, наприклад на жувальних поверхнях і/або навколо зубних шийок. Накласти COLORANT і опромінити, згідно з таблицею полімеризації. Допускається використання COLORANT як зовнішнього шару, однак, найкращого результату можна досягнути, вкриваючи COLORANT шаром композиту 1-2 мм.

ТАБЛИЦЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Лампа	Композит COLORANT	Залежність глибини полімеризації (мм) від часу опромінення	
		20 с	30 с
Halogen/LED (500-800 мВт/см ²)	А, В	1,0 мм	1,5 мм
	С, Білий, Ясенний	-	1,0 мм
LED (>800 мВт/см ²)	А, В	1,5 мм	2,0 мм
	С, Білий, Ясенний	1,0 мм	1,5 мм

СКЛАД

Суміш диметакрилатових смол: BisGMA, TEGDMA, UDMA, BisEMA; неорганічні наповнювачі (біла, 60% маси): скло Al-Ba-B-Si, скло Ba-Al-B-F-Si, діоксид кремнію, пігменти, фотоніціатор (CQ : DMAEMA). Розмір більшості часток неорганічних наповнювачів є в межах від 20 нм до 2,0 μm.

COLORANT можна застосовувати з усіма композитами на базі диметакрилових смол.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати композит COLORANT у пацієнтів з вираженою чутливістю на будь-який з компонентів матеріалу.

ПОБІЧНА ДІЯ

Побічна дія матеріалу COLORANT не була виявлена, однак, у осіб з підвищеною чутливістю не можна виключити виникнення ознак алергії. При проявах алергічної реакції негайного типу, слід припинити застосування матеріалу. При проявах віддаленої алергічної реакції, слід замінити реконструкцію.

ОБМЕЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ, ВЗАЄМОДІЯ

Не застосовувати у випадку, коли неможлива повна ізоляція роботи від вологи, слини чи крові. Забруднення можуть порушити процес полімеризації.

Не допускати прямого контакту з матеріалами, що містять фенолові сполуки, зокрема з евгенолом або тимолом. Ці сполуки можуть порушувати процес полімеризації композиту COLORANT.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уникати контакту неполімеризованого матеріалу зі шкірою, м'якими тканинами ротової порожнини та очима. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води. У разі виникнення відчуття недуги, звернутися за медичною допомогою та надати інформацію про продукт. Для мінімізації ризику контакту під час роботи застосовувати особисті захисні засоби, такі як рукавички, маска на обличчя і окуляри. При потрапленні препарату до шлунково-кишкового тракту чи дихальних шляхів слід негайно звернутися до лікаря.

Для ізоляції робочого поля рекомендовано застосовувати кофердам.

Необхідно подбати про правильне опромінення полімеризаційною лампою, особливо у важкодоступних місцях.

У разі будь-якого забруднення неполімеризованим композитом, необхідно усунути забруднений шар матеріалу.

У разі неповної полімеризації, видалити неправильно полімеризований шар внести наступний, правильно направити промінь світла полімеризаційної лампи.


Уникати забруднення поверхні шприца з матеріалом (ризик перехресних інфекцій).

У випадку нанесення COLORANT безпосередньо із шприца, з гігієнічних міркувань, аплікатор повинен використовуватись тільки у одного пацієнта.

Для уникнення випадкової полімеризації композиту COLORANT в аплікаторі, завжди втягувати поршень шприца відразу після використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Зберігати у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці.

 Зберігати у захищеному від світла місці. Полімеризація композиту може розпочатись в оточуючому світлі.

Не перегрівати. Не заморожувати.

Застосовувати відповідно до інструкції виробника.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі не вище 30°C. Не наражати на безпосередню дію сонячного світла.

У разі зберігання при зниженій температурі, перед використанням препарат необхідно довести до кімнатної температури.

Продукт призначений виключно для стоматологів і зубних техніків.

ГАРАНТІЯ

Фірма ARKONA дає можливість заміни або повернення вартості товару, у випадку підтверженої вади. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправильного чи неналежного використання матеріалу.

Дата останньої актуалізації інструкції: 28.02.2021



Ексклюзивний дистриб'ютор:
Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцарія



Уповноважений представник в Україні:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАТУРФАРМ» (ПРАТ «Натурфарм»)
04075 Україна, Київ, Пуща-Водича,
вул. Лісна 30-А, Тел. (044) 401-81-03



ARKONA
ARKONA Лабораторія Стоматологічної Фармакології Гжегож Кальбарчик
Насутле 99С, 21-025 Немце, Польща
www.arkonadent.com

