

MASTERBOND

СТОМАТОЛОГІЧНА АДГЕЗИВНА СИСТЕМА




ARKONA

MD Медичний виріб класу IIa


ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Стоматологічна адгезивна система MASTERBOND застосовується для: з'єднання твердих тканин зуба з композитними пломбами, герметизації маргінальної щілини, зменшення полімеризаційної усадки, підготовки поверхні протетичних робіт перед їх цементуванням композитними цементами дуального затвердіння.

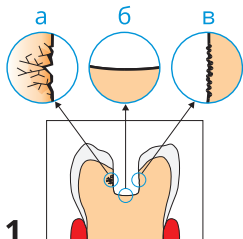

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ


Ретельно підготувати порожнину. Композит дуже добре приклеюється виключно до правильної структури емалі та дентину (**б**) – натомість, відклеюється від карієсу (**а**). Ретельно вирівняні стінки порожнини забезпечують належну силу утримання пломби і забезпечать від її втрати, внаслідок відлущення мікронерівностей (**в**) під час жування.

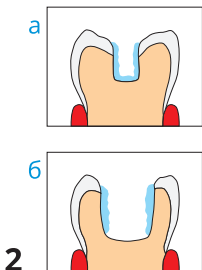

Протравити, використовуючи ETCHMASTER, всю поверхню порожнини (**а**) (можна оминати лише найглибші ділянки (**б**) - композит не з'єднується з демінералізованими тканинами). Ретельно промити і осушити.

ТАБЛИЦЯ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

ЛАМПА	Час опромінення
Halogen/LED (500-800 мВт/см ²)	15 с
LED (>800 мВт/см ²)	10 с

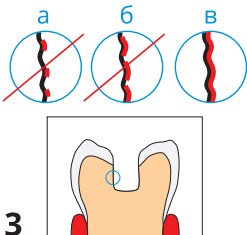

Ретельно вкрити порожнину адгезивною системою MASTERBOND, старанно втираючи її кілька секунд. Забезпечити повне вкриття стінок порожнини адгезивною системою, що забезпечить оптимальну адгезію композиту до зуба:

а, б – недостатньо, **в** - правильно.

Видути надлишок адгезиву. Опромінити відповідно до таблиці полімеризації.

СКЛАД

Суміш диметакрилових смол (BisGMA, HEMA, BisEMA) з додаванням етилового спирту, каталізаторів, інігіаторів, фотоініціатора (CQ : DMAEMA).

Затвердіння MASTERBOND відбувається шляхом вільнорадикальної полімеризації, активованої видимим світлом синього кольору (довжина хвилі 400—500 нм).

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Не застосовувати адгезивну систему MASTERBOND у пацієнтів з вираженою чутливістю на будь-який компонент матеріалу.

ПОБІЧНА ДІЯ

Побічна дія адгезивної системи MASTERBOND не була виявлена, однак, у осіб з підвищеною чутливістю не можна виключити виникнення ознак алергії. При проявах алергічної реакції негайного типу, слід припинити застосування матеріалу. При проявах віддаленої алергічної реакції, слід замінити реконструкцію. У випадку гіперчутливості рекомендовано застосування підкладок: склоіономерних або на основі гідроксиду кальцію.

ОБМЕЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ, ВЗАЄМОДІЯ

Не застосовувати у випадку, коли неможлива повна ізоляція роботи від вологи, слини чи крові. Забруднення можуть порушити процес полімеризації, призводячи до погіршення механічних характеристик та зменшення тривалості реконструкцій.

Не допускати прямого контакту з матеріалами, що містять фенолові сполуки, зокрема з евгенолом або тимолом. Ці сполуки можуть порушувати процес полімеризації адгезивної системи MASTERBOND.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Уникати контакту неполімеризованого матеріалу зі шкірою, м'якими тканинами ротової порожнини та очима. У разі контакту, негайно промити великою кількістю води. У разі виникнення відчуття недуги, звернутися за медичною допомогою та надати інформацію про продукт. Для мінімізації ризику контакту під час роботи застосовувати особисті захисні засоби, такі як рукавички, маска на обличчя і окуляри.

При потрапленні препарату до шлунково-кишкового тракту чи дихальних шляхів слід негайно звернутися до лікаря.

Для ізоляції робочого поля рекомендовано застосовувати кофердам.

Необхідно подбати про правильне опромінення полімеризаційною лампою. Неполімеризована адгезивна система може викликати алергічні реакції у пацієнта.

У випадку забруднення або механічного ушкодження якогось із шарів композиту, ретельно зішліфувати поверхню і вкрити адгезивом MASTERBOND перед внесенням чергового шару. При забрудненні порожнини, вкритої адгезивом MASTERBOND, повторити протравку і знову вкрити адгезивною системою. У разі неповної полімеризації, видалити неправильно полімеризований шар внести наступний, правильно направити промінь світла полімеризаційної лампи.

Уникати забруднення поверхні флакону і крапельниці (ризик перехресного зараження).

Для уникнення випадкової полімеризації адгезивної системи MASTERBOND, закривати флакон відразу після використання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Зберігати у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці. Зберігати у захищеному від світла місці. Полімеризація адгезиву може розпочатись в оточуючому світлі.

Не перегрівати. Не заморозувати. Тримати подалі від джерела вогню.

Застосовувати відповідно до інструкцій виробника.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі не вище 25°C. Не наражати на безпосередню дію сонячного світла.

Продукт призначений виключно для стоматологів і зубних техніків.

ГАРАНТІЯ

Фірма ARKONA дає можливість заміни або повернення вартості товару, у випадку підтвердженої вади.

Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправильного чи неналежного використання матеріалу.

Дата останньої актуалізації інструкції: 16.03.2021



Ексклюзивний
дистрибутор:
Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцарія



Уповноважений представник в Україні:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАТУРФАРМ» (ПРАТ «Натурфарм»)
04075 Україна, Київ, Пушча-Водиця,
вул. Лісна 30-А, Тел. (044) 401-81-03



ARKONA

ARKONA Лабораторія Стоматологічної
Фармакології Гжегож Кальбарчик
Насутув 99С, 21-025 Немце, Польща
www.arkonadent.com