

SILGIPS

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СИЛІКОН
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ
ЗУБНИХ РЯДІВ



УПАКОВКА МІСТИТЬ

- два подвійні картриджі, 50 мл кожен
- 8 насадок для змішування
- 8 кінцівок

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

SILGIPS призначений для швидкого виготовлення моделей без застосування гіпсу для:

- індивідуальних коронково-кореневих вкладок
- накладок і вкладок
- вінірів на базі композитних матеріалів світлового затвердіння
- коронок і ендокоронок
- мостів
- шин

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІДБИТКА

1. Виготовити двохаровий силіконовий відбиток зубного ряду з ділянкою, призначеною для протезування.
2. Промити, очистити і ретельно осушити отриманий відбиток. **УВАГА!** Волога або забруднення відбитка можуть призвести до недокладного відтворення умов ротової порожнини а також перешкодити процесу полімеризації матеріалу SILGIPS.
3. Вкрити відбиток тонким шаром ізоляційного матеріалу.

ВИГОТОВЛЕННЯ МОДЕЛІ З МАТЕРІАЛУ SILGIPS

1. Вставити картридж у змішувальний пістолет.
УВАГА! З метою безпечного і правильного закріплення картриджа в пістолеті, завжди керуватись порадами виробника даного пристрою. Вся потрібна інформація, яка стосується роботи з цим пристроєм, знаходиться у інструкціях його виробника.
2. Вставити насадку для змішування на картридж і поверніть її аж до заблокування.
3. Закріпити кінцівку на насадці для змішування так, щоб її вузький отвір був скерований вниз. Застосування кінцівки не є необхідним, але дає можливість виготовлення більш докладної моделі через введення матеріалу SILGIPS у найдрібніші ділянки відбитка. **УВАГА!** Перед першим застосуванням необхідно вирівняти рівень наповнення обох компонентів. З цією метою треба витиснути і викинути біля 2 см матеріалу. При застосуванні картриджів з різними насадками для змішування це потрібно робити після кожної заміни такої насадки.
4. Наповнити очищений і осушений відбиток матеріалом SILGIPS, починаючи від одного з країв відбитка. Відбиток повинен бути заповненим трохи вище рівня краю ложки для відбитків. Це дозволить створити основу для моделі. Час наповнення відбитка матеріалом не повинен бути довшим, ніж 15 с (час роботи при кімнатній температурі 22°C). Підвищення температури скорочує, а зниження збільшує час роботи з матеріалом.
УВАГА! Щоб уникнути утворення повітряних пухирців у моделі, потрібно вносити SILGIPS поступово просуваючи кінцівку насадки вздовж відбитка, у його найглибший ділянку, одночасно утримуючи її зануреною в масі, що витискається.

5. Після наповнення відбитку силіконом SILGIPS перевернути і розмістити відбиток на плоскій поверхні.
6. Через біля 2 хв. виняти модель з відбитка (час роботи при кімнатній температурі 22°C). Підвищення температури скорочує, а зниження збільшує час полімеризації матеріалу.

ПОБІЧНА ДІЯ

Побічна дія матеріалу SILGIPS не була виявлена, однак, у осіб з підвищеною чутливістю не можна виключити виникнення ознак алергії. При проявах алергічної реакції негайного типу, слід припинити застосування матеріалу. У разі поганого самопочуття звернутись до лікаря.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

SILGIPS можна застосовувати для виготовлення моделей на основі альгінатного відбитка. Альгінатний відбиток не потребує застосування ізоляційного матеріалу, однак є набагато менш докладний ніж відбиток з силікону.

ОБМЕЖЕННЯ У ЗАСТОСУВАННІ

З огляду на можливість механічного пошкодження картриджів, оберегати їх від падіння з висоти.

Регулярно перевіряти всі компоненти на предмет механічних ушкоджень. Не застосовувати у випадку виявлення пошкоджень картриджа або насадки для змішування.

При роботі з матеріалом SILGIPS вживати виключно нітрилові або вінілові рукавиці. Робота у латексних рукавицях може негативно впливати на зв'язування матеріалу SILGIPS.

Через можливість змін у процесі зв'язування матеріалу, уникати контакту SILGIPS з матеріалами, які містять активно сірку або азот.

Уникати контакту незв'язаного матеріалу SILGIPS із шкірою та одягом.

При контакті матеріалу SILGIPS з очима, промити їх водою протягом кількох хвилин. У разі виникнення недуги, звернутись до лікаря.

Потраплення матеріалу у шлунково-кишковий тракт може призвести, у рідкісних випадках до порушень перистальтики. У випадку виникнення недуги, звернутись до лікаря.

Попередньо використовувані картриджі зберігати у лежачому положенні виключно із закріпленою насадкою для змішування. При тривалій перерві застосування, перед черговим використанням зняти стару насадку і замінити на нову

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Зберігати у недоступному для дітей та сторонніх осіб місці.

Застосовувати згідно з рекомендаціями виробника.

Не перегрівати. Не заморозжувати.

Застосовувати відповідно до інструкцій виробника.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі не вище 25°C.

Продукт призначений виключно для стоматологів і зубних техніків.

ГАРАНТІЯ

Фірма ARKONA дає можливість заміни або повернення вартості товару, у випадку підтвердженої вади. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли внаслідок неправильного чи неналежного використання матеріалу.

Дата останньої актуалізації інструкції: 09.04.2021



Ексклюзивний дистрибутор:
Альпін Фарма АГ
Берн, Швейцарія



Уповноважений представник в Україні:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАТУРАФАРМ» (ПРАТ «Натурафарм»)
04075 Україна, Київ, Пуш-Водилце,
вул. Лісна 30-А, Тел. (044) 401-81-03



ARKONA
АРКОНА Лабораторія Стоматологічної
Фармакології Гієгож Кальбарнш
Насутус 99С, 21-025 Немец, Польща
www.arkonadent.com

