



Endocort®-H

Цемент
цинкооксидевгенольний

Склад порошку

17 % діюдтимолю
1 % гідрокортизону ацетат
0,01 % дексаметазон
параформальдегід,
рентгеноконтрастна добавка,
оксид цинку, наповнювач до 100%.

Рідина для змішування

Евгенол (Eugenol)

Призначення

Endocort-H призначений для постійного пломбування кореневих каналів всіх груп зубів. При необхідності можливе використання штифта.

Властивості

Endocort-H - рентгеноконтрастний пломбувальний матеріал типу «порошок-рідина», що має бактерицидні і антисептичні властивості. В якості рідини для змішування використовується Евгенол (Eugenol). Робочий час матеріалу складає 3-6 годин.

Затвердіння матеріалу в кореновому каналі відбувається протягом 48 годин. В разі необхідності затверділий матеріал легко видаляється з каналу зуба.

Спосіб застосування

Кореневий канал обробляють загальноприйнятим способом інструментально і медикаментозно. Висушують стисненим повітрям. На блокнот для змішування поміщають порошок і рідину в співвідношенні 1 мірник порошку та 1 крапля рідини. Компоненти ретельно змішують протягом 20-30 секунд для отримання однорідної маси, яку легко можна вносити в канал за допомогою каналонаповнювача або з використанням необхідного штифта. Отриманою пастою заповнюють кореневий канал. Потім проводять рентгенівський контроль заповнення каналу, і приступають до пломбування зуба.

Побічні дії

При правильному зберіганні та дотриманні інструкції по застосуванню побічні дії відсутні.

Попередження

Індивідуальна непереносимість.

Запобіжні заходи

Проінформувати пацієнта про склад.

Протипоказання

Алергія на окремі складові частини цементу.

Утилізація

Використані вироби не становлять небезпеку для навколишнього природного середовища, і можуть бути утилізовані спільно з побутовими відходами.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 0°C до +25°C. Після використання матеріали щільно закрити.

Термін зберігання: 3 роки.

Вміст пакування

Порошок во флаконі 20 г

Рідина во флаконі 10 г

Кришка з піпеткою

Мірник

Блокнот для змішування

Інструкція по застосуванню



UA.TR.130

Тільки для професійного використання





Endocort-H®

Цемент
цинкокисидэвгенольный

Состав порошка

17% дийодтимола
1% гидрокортизона ацетат
0,01% дексаметазон
параформальдегид,
рентгеноконтрастная добавка, оксид
цинка, наполнитель до 100%.

Жидкость для замешивания

Эвгенол (Eugenol)

Назначение

Endocort-H предназначен для постоянного пломбирования корневых каналов всех групп зубов. При необходимости возможно использование штифта.

Свойства

Endocort-H-рентгеноконтрастный пломбировочный материал типа «порошок-жидкость», который обладает бактерицидными и антисептическими свойствами. В качестве жидкости для замешивания используется Эвгенол (Eugenol). Рабочее время материала составляет 3-6 часов. Отверждение материала в

корневом канале происходит в течение 48 часов. В случае необходимости затвердевший материал легко удаляется из канала зуба.

Способ применения

Корневой канал обрабатывают общепринятым способом инструментально и медикаментозно. Сушат сжатым воздухом. На блокнот для замешивания помещают порошок и жидкость в соотношении 1 мерник порошка и 1 капля жидкости. Компоненты тщательно перемешивают в течение 20-30 секунд для получения однородной массы, которую легко можно вносить в канал с помощью каналонаполнителя или с использованием необходимого штифта. Полученной пастой заполняют корневой канал. Затем проводят рентгеновский контроль заполнения канала, и приступают к пломбированию зуба.

Побочные действия

При правильном хранении и соблюдении инструкции по применению побочные действия отсутствуют.

Предупреждение

Индивидуальная непереносимость.

Меры предосторожности

Проинформировать пациента о

составе.

Противопоказания

Аллергия на отдельные составные части цемента.

Утилизация

Использованные изделия не представляют опасности для окружающей природной среды и могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Условия хранения

Хранить при температуре от 0 до +25°C. После использования материалы плотно закрыть. Срок хранения 3 года.

Содержание упаковки

Порошок во флаконе 20 г
Жидкость во флаконе 10 г
Крышка с пипеткой
Мерник

Блокнот для замешивания
Инструкция по применению



Только для
профессионального
использования

