



# Hemalat<sup>®</sup>

## Гемостатическое средство

Гемостатическое средство в виде геля с содержанием 25% хлорида алюминия.

### Назначение

Применяется в стоматологии как местное гемостатическое средство при капиллярных кровотечениях десен, а также для ретракции десны (с помощью пропитки ретракционной нити).

### Свойства

Hemalat оказывает местное гемостатическое действие, наступающее непосредственно после его нанесения. Очень мягко воздействует на твердые и мягкие ткани. Хорошо смывается водой, не оставляя следов и пятен. Мягкая форма геля позволяет легко наносить и облегчает введение ретракционной нитки.

### Способ применения

При капиллярном кровотечении на ватный тампон наносят

1-2 капли Hemalat и прикладывают к поверхности десны. Через 60 секунд тщательно промывают обработанный участок водой и подсушивают струей воздуха.

При ретракции десны ретракционную нить смачивают гемостатическим средством и помещают в десневую борозду, затем удаляют нить и тщательно промывают водой.

### Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.



**Только для  
профессионального  
использования**





# Hemalat<sup>®</sup>

## Гемостатичний засіб

Гемостатичний засіб у вигляді гелю із вмістом 25% хлориду алюмінію.

### Призначення

Застосовується у стоматології в якості місцевого гемостатичного засобу при капілярних кровотечах ясен, а так само для ретракції ясен (за допомогою просочення ретракційної нитки).

### Властивості

Hemalat має місцеву гемостатичну дію, яка настає безпосередньо після його нанесення. Щадно впливає на тверді та м'які тканини. Добре змивається водою, не залишаючи слідів та плям. М'яка форма гелю дозволяє легко наносити та полегшує введення ретракційної нитки.

### Спосіб застосування

При капілярній кровотечі на ватний тампон наносять 1-2 краплі Hemalat та прикладають до поверхні ясен. Через

60 секунд ретельно промивають оброблену ділянку водою та підсушують струменем повітря.

При ретракції ясен ретракційну нитку змочують гемостатичним засобом і поміщають в ясенну борозну, потім видаляють нитку, ретельно промивають водою.

### Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.



**Тільки для  
професійного  
використання**

