



Peroxidam[®]

Жидкий коффердам

Назначение

Peroxidam предназначен для изоляции мягких тканей при отбеливании зубов.

Свойства

Жидкий коффердам это светоотверждаемый материал. Peroxidam имеет оптимальную консистенцию для удобного нанесения. Контрастный синий цвет делает его хорошо видимым на деснах и зубах, что обеспечивает эффективную защиту.

Способ применения


Высушить десну и зубы в области, которую необходимо защитить. Нанести тонкий слой (не более 1 мм) коффердама из шприца на прилегающие мягкие ткани. Провести фотополимеризацию в течение 20 секунд. Для удаления

необходимо поддеть его за край подходящим инструментом.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25 °С. После использования материал плотно закрыть.

**Только для
профессионального
использования**

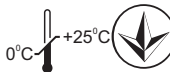



Peroxidam[®]

Рідкий коффердам

Призначення

Peroxidam призначений для ізоляції м'яких тканин при відбілюванні зубів.

Властивості

Peroxidam це світлотверднучий матеріал. Рідкий коффердам має оптимальну консистенцію для зручного нанесення. Контрастний синій колір робить його видимим на яснах і зубах, що забезпечує більш ефективний захист.

Спосіб застосування

Висушити ясна і зуби в області, яку необхідно захистити. Нанести тонкий шар (не більше 1 мм) коффердама зі шприца на прилеглі м'які тканини. Провести фотополімеризацію протягом 20 секунд. Для видалення необхідно підчепити

його за край відповідним інструментом.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

Тільки для професійного використання

