

Acrorest™**Дихлоретановий клей****Назначення**

Дихлоретановий клей **Acrorest** призначений для технологічної фіксації отломків акрилових пластиночних протезів при починке самотвердуючої пластмасою.

Состав и свойства

Дихлоретановий клей **Acrorest** представляє собою розчин поліметилметакрилату в дихлоретане. Это прозора чи мутновата жидкість с вязкістю розчину клею (в соотношении 1:10) 2,0-4,0 мм²/с и достаточной високою прочністю склеивания, наступающей через 16 – 20 часов. При осторожном обращении с протезом, через 30 минут можно приступити к отливке гипсовой модели и контрмодели.


Способ применения

Для фиксации частей поломанного протеза на поверхность излома кисточкой наносят равномерный слой клею **Acrorest**. Клею дают высохнуть до исчезновения липкости. Наносят второй слой клею. Складывают части протеза по линии излома и прочно удерживают 3-4 минуты в правильном положении. Далее приступают к починке самотвердуючої пластмасою, если части протеза имеют достаточную фиксацию.

Условия хранения и маркировкаУсловия хранения

Acrorest в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Маркировка

Символ  указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.

Acrorest™**Діхлоретановий клей****Призначення**

Діхлоретановий клей **Acrorest** призначений для технологічної фіксації відломків акрилових пластиночних протезів при полагодженні самотвердуючої пластмасою.

Склад та властивості

Діхлоретановий клей **Acrorest** представляє собою розчин поліметилметакрилату у діхлоретані. Це прозора чи мутновата рідина з в'язкістю розчину клею (у співвідношенні 1 : 10) 2,0-4,0 мм²/с та достатньо великою міцністю склеювання, що настає через 16 – 20 годин. У разі обережного застосування протезу, через 30 хвилин можна починати відливання гіпсової моделі та контрмоделі.

Спосіб застосування


Для фіксації частин поламаною протезу на поверхню злому пензликом наносять рівномірний шар клею **Acrorest**. Клею дають висохнути до зникнення липкості. Наносять другий шар клею.

Складають частини протезу вздовж лінії злому та міцно утримують 3-4 хвилини у правильному положенні. Далі беруться до полагодження самотвердуючої пластмасою, якщо частини протезу мають достатню фіксацію.

Умови зберігання та маркуванняУмови зберігання

Acrorest в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.

Маркування

Символ  вказує рекомендуєміий кінцевий термін використання виробу.