



# Hemalat®

## Гемостатическое средство

### Назначение

Применяется в стоматологии как местное гемостатическое средство при капиллярных кровотечениях десен, а также для ретракции десны (с помощью пропитки ретракционной нити).

### Свойства

Hemalat оказывает местное гемостатическое действие, наступающее непосредственно после его нанесения. Очень мягко воздействует на твердые и мягкие ткани. Хорошо смывается водой.

### Способ применения

При капиллярном кровотечении на ватный тампон наносят 1-2 капли Hemalat и прикладывают к поверхности десны. Через 60 секунд тщательно промывают обработанный участок водой и подсушивают струей воздуха.

При ретракции десны-ретракционную нить смачивают

гемостатическим средством и помещают в десневую борозду, затем удаляют нить и тщательно промывают водой.

Наносить необходимо минимальное количество средства для обеспечения требуемого результата.

### Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

### Только для профессионального использования





# Hemalat®

## Гемостатичний засіб

### Призначення

Застосовується у стоматології в якості місцевого гемостатичного засобу при капілярних кровотечах ясен, а так само для ретракції ясен (за допомогою просочення ретракційної нитки).

### Властивості

Hemalat має місцеву гемостатичну дію, яка наступає безпосередньо після його нанесення. Дуже щадно впливає на тверді та м'які тканини. Добре змивається водою.

### Спосіб застосування

При капілярній кровотечі на ватний тампон наносять 1-2 краплі Hemalat та прикладають до поверхні ясен. Через 60 секунд ретельно промивають оброблену ділянку водою та підсушують струменем повітря.

При ретракції ясен ретракційну нитку змочують

гемостатичним засобом і поміщають в десневу борозну, потім видаляють нитку, ретельно промивають водою.

### Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

**Тільки для  
професійного  
використання**

