



Desgel®

Антисептичний гель для обробки кореневих каналів

Склад

2% хлоргексидину біглюконат, кремнію діоксид, вода дистильована до 100%.

Призначення

Desgel призначений для антисептичної обробки кореневих каналів, як антибактеріальний засіб після інструментальної обробки каналу.

Властивості

Desgel містить хлоргексидину біглюконат (2%) - антисептик, який активно пригнічує анаеробну флору, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та зберігає активність у присутності крові і гною. Володіє достатньою в'язкістю для обробки порожнин зубів верхньої щелепи та щадяще впливає на слизову оболонку ротової порожнини.

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю вносять через канюлю безпосередньо в кореневий канал. Дають витримку протягом 2-3 хвилини, після часу витримки гель змивають водою. Потім канал висушують стисненим повітрям. Далі можна приступати до заповнення кореневого каналу обраним пломбувальним матеріалом.

Desgel слід використовувати після ретельного видалення слідів гіпохлориту натрію з кореневого каналу.

Не рекомендується одночасне застосування з йодом. Не слід змішувати Desgel з дезінфекційними та миючими засобами.

Побічні дії

При правильному зберіганні та дотриманні інструкції по застосуванню побічні дії відсутні.

Попередження

Індивідуальна непереносимість.

Запобіжні заходи

Проінформувати пацієнта про склад.

Протипоказання

Алергія на хлоргексидину біглюконат.

Утилізація

Використані вироби не становлять небезпеки для навколишнього природного середовища, і можуть бути утилізовані спільно з побутовими відходами.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 0°C до +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.

Термін зберігання: 2 роки.

Вміст пакування

Гель в шприці по 5 г.

Канюлі 3 шт.

Інструкція по застосуванню.



ПП «Латус»

61010 м. Харків

вул. Текстильна, 82

Тел. + 380577332697

www.latus.com.ua



UA-TR.130

Тільки для професійного використання



Инструкция по применению



Desgel®

Антисептический гель для обработки корневых каналов

Состав

2% хлоргексидина биглюконат, кремния диоксид, вода дистиллированная до 100%.

Назначение

Desgel предназначен для антисептической обработки корневых каналов, как антибактериальное средство после инструментальной обработки канала.

Свойства

Desgel содержит хлоргексидина биглюконат (2%)-антисептик, который активно подавляет анаэробную флору, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и сохраняет активность в присутствии крови и гноя. Обладает достаточной вязкостью для обработки полостей зубов верхней челюсти и щадяще воздействует на слизистую оболочку ротовой полости.

Способ применения

Небольшое количество геля вносят через канюлю непосредственно в корневой канал. Дают выдержку в течение 2-3 минут, после времени выдержки гель смывают водой. Затем канал высушивают сжатым воздухом. Далее можно приступать к заполнению корневого канала выбранным пломбировочным материалом.

Desgel следует использовать после тщательного удаления следов гипохлорита натрия из корневого

Дата последнего пересмотра 09.2021

канала. Не рекомендуется одновременное применение с йодом. Не следует смешивать Desgel с дезинфицирующими и моющими средствами.

Побочные действия

При правильном хранении и соблюдении инструкции по применению побочные действия отсутствуют.

Предупреждение

Индивидуальная непереносимость.

Меры предосторожности

Проинформировать пациента о составе.

Противопоказания

Аллергия на хлоргексидина биглюконат.

Утилизация

Использованные изделия не представляют опасности для окружающей природной среды и могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Условия хранения

Хранить при температуре от 0°C до +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

Срок хранения 2 года.

Содержание упаковки

Гель в шприце по 5 г.

Канюли 3 шт.

Инструкция по применению.



ЧП «Латус»

61010 г. Харьков

ул. Текстильная, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua



UA.TR.130

Только для профессионального использования

