



Dimesol®

Средство для
распломбирования
корневых каналов

Назначение

Dimesol используют при перепломбировке корневых каналов для очистки канала от пломбировочного материала (Citofi F, Citofil Ca), эпоксидных, резорцин-формалиновых смол и цинкоксидэвгенольных цементов.

Свойства

Dimesol представляет собой средство, способное впитываться в материалы для пломбирования каналов, быстро снижая их прочность.

Способ применения

Механическим путем максимально расширяют камеру и вход в каналы и помещают ватный тампон, смоченный средством Dimesol, в корневой канал. Слегка спрессовывают тампон, после чего закрывают полость временной пломбой до следующего приема.

Через 1-2 дня вскрывают временную пломбу и проводят распломбирование размягченного материала механическим путем.

После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить для подготовки к последующему пломбированию.

Внимание!

Остерегаться попадания в глаза.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП "Латус"

61010 г. Харьков

ул. Текстильная, 82

тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**





Dimesol®

Засіб для
розпломбування
кореневих каналів

Призначення

Dimesol використовують при перепломбуванні кореневих каналів для очищення каналу від пломбувального матеріалу (Citofil F, Citofil Ca), епоксидних, резорцин-формалінових смол і цинкоксидевгенольних цементів.

Властивості

Dimesol являє собою засіб, здатний всмоктуватися у матеріали для пломбування каналів, швидко зменшуючі їх міцність.

Спосіб застосування

Механічним шляхом максимально розширюють камеру і вхід у канали та розміщують ватяний тампон, який зволожено засобом Dimesol, у кореневий канал. Злегка спресовують тампон, після чого закривають порожнину тимчасовою пломбою до наступного прийому.

Через 1-2 дні вскривають тимчасову пломбу та проводять розпломбування розм'якшеного матеріалу механічним шляхом.

Після розпломбування канал необхідно промити, знежирити та просушити для підготовки до наступного пломбування.

Увага!

Застерігатися попаданню в очі.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП "Латус"

61010 м. Харків

вул. Текстильна, 82

тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

