



# Endohex®

Жидкость для очистки и промывания корневых каналов

## Состав жидкости

2% хлоргексидина биглюконат  
вода дистиллированная до 100%

## Назначение

Endohex предназначен для очистки и промывки инфицированных корневых каналов полостей зубов верхней и нижней челюсти как антисептическое средство после инструментальной обработки канала.

## Свойства

Endohex щадяще воздействует на слизистую оболочку полости рта. Жидкость достаточно быстро и эффективно действует в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных микроорганизмов, а также на возбудителей различных инфекций. Endohex проявляет как бактериостатическое, так и бактерицидное действие.

## Способ применения

Небольшое количество жидкости вносят с помощью шприца с насадкой непосредственно в корневой канал. Дают выдержку 1-2 минуты, после чего остатки смывают водой. Затем канал высушивают сжатым воздухом. Далее можно приступать к следующему этапу лечения.

Endohex следует использовать после тщательного удаления следов гипохлорита натрия из корневого канала.

Не рекомендуется одновременное применение с йодом. Не следует смешивать Endohex с дезинфицирующими и моющими

средствами. Шприц после использования следует продезинфицировать.

## Побочные действия

При правильном хранении и соблюдении инструкции по применению побочные действия отсутствуют.

## Предупреждение

Индивидуальная непереносимость.

## Меры предосторожности

Проинформировать пациента о составе.

## Противопоказания

Аллергия на хлоргексидина биглюконат.

## Утилизация

Использованные изделия не представляют опасности для окружающей природной среды и могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

## Условия хранения

Хранить при температуре от 0°C до +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

Срок хранения 3 года.

## Содержание упаковки

Жидкость во флаконе по 100 г.

Шприц для дозирования.

Инструкция по применению.



ЧП «Латус»  
61010 г. Харьков  
ул. Текстильная, 82  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

**Только для профессионального использования**

## Інструкція по застосуванню



# Endohex®

Рідина для очищення і промивання кореневих каналів

### Склад рідини

2 % хлоргексидину біглюконат  
вода дистильована до 100%

### Призначення

Endohex призначений для очищення і промивання інфікованих кореневих каналів порожнин зубів верхньої і нижньої щелепи як антисептичний засіб після інструментальної обробки каналу.

### Властивості

Endohex щадно впливає на слизову оболонку порожнини рота. Рідина досить швидко і ефективно діє по відношенню до більшості грампозитивних і грамнегативних аеробних і анаеробних мікроорганізмів, а також на збудників різних інфекцій. Endohex проявляє як бактеріостатичну, так і бактерицидну дію.

### Спосіб застосування

Невелику кількість рідини вносять за допомогою шприца з насадкою безпосередньо у кореневий канал. Дають витримку 1-2 хвилини, після чого залишки змивають водою. Потім канал висушують стисненим повітрям. Далі можна приступати до наступного етапу лікування.

Endohex слід використовувати після ретельного видалення слідів гіпохлориту натрію з кореневого каналу. Не рекомендується одночасне застосування з йодом. Не слід

Дата останнього перегляду 09.2021

змішувати Endohex з дезінфекційними та миючими засобами. Шприц після використання слід продезінфікувати.

### Побічні дії

При правильному зберіганні та дотриманні інструкції по застосуванню побічні дії відсутні.

### Попередження

Індивідуальна непереносимість.

### Запобіжні заходи

Проінформувати пацієнта про склад.

### Протипоказання

Алергія на хлоргексидину біглюконат.

### Утилізація

Використані вироби не становлять небезпеку для навколишнього природного середовища, і можуть бути утилізовані спільно з побутовими відходами.

### Умови зберігання

Зберігати при температурі від 0°C до +25°C.  
Після використання матеріал щільно закрити.  
Термін зберігання: 3 роки.



### Вміст пакування

Рідина во флаконі по 100 г.  
Шприц для дозування.  
Інструкція по застосуванню.



ПП «Латус»  
61010 м. Харків  
вул. Текстильна, 82  
Тел. + 380577332697  
www.latus.com.ua



**Тільки для професійного використання**