

PAROSIN

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ ДЕСНЕВЫХ КАРМАНОВ

MD Медицинское изделие 1 класса

Препарат в виде жидкости со шприцем-дозатором для полоскания, промывания и чистки десневых карманов

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Снимите наконечник и вместо него установите аппликатор. Осторожно поместите его как можно глубже в десневой карман. Медленно нажимая на поршень шприца, промойте место воспаления. Промывать до тех пор, пока все твёрдые отложения не выйдут из кармана. По окончании промывания порекомендовать пациенту прополоскать рот водой.

Для уменьшения болевых ощущений во время полоскания слегка нагреть препарат перед использованием, поместив его, например, в тёплую воду.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Десневые карманы
- Области полостей II класса
- Область зубов с затруднённым прорезыванием, особенно восьмёрки
- После удаления зубного камня
- Отеки дёсен под протезами и в области зубов, поддерживающих брекеты
- Под ортопедическими конструкциями (мосты, коронки)
- Перед экстракцией, в десневых карманах, прилегающих к зубу, подлежащему удалению
- В области ортодонтических аппаратов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.



ARKONA

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не имеется при проведении процедуры в соответствии с показаниями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Препарат для стоматологов и гигиенистов.

Препарат PAROSIN не следует применять для полоскания корневых каналов. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте.

Препарат можно применять при язвенной болезни, сахарном диабете и в состоянии беременности. Не вызывает привыкания и осложнений. Может использоваться, исходя из индивидуальных потребностей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегать попадания в глаза. В случае контакта промыть большим количеством воды и обратиться к специалисту.


ГАРАНТИЯ

Компания ARKONA обменивает продукцию, которая имеет выявленные недостатки, или возвращает стоимость покупки. ARKONA не несёт ответственности за убытки или ущерб, вызванные неправильным или не соответствующим инструкции применением препарата.


СОСТАВ

1. Озонированная вода
2. Нанокolloид серебра
3. Нитрат натрия
4. Ароматизаторы
5. Ортофосфорная кислота
6. Молочная кислота



1. Воспаление десневых карманов

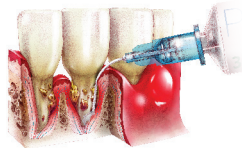


2. Область зубов с затруднённым прорезыванием (особенно восьмёрки)

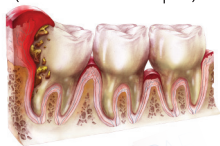

3. Под ортопедическими конструкциями (мосты, коронки)

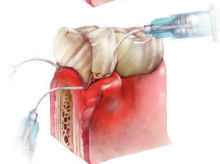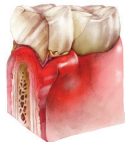

4. Области рядом с полостями II класса

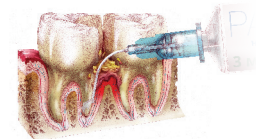

Дата последней актуализации инструкции: 30.08.2021

CE
1639


ARKONA

ARKONA
Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Grzegorz Kalbarczyk Nasutow 99C,
21-025 Niemce, Poland, Сделано в Польше,
www.arkonadent.ru