



Trimlat®

Назначение

Жидкость Trimlat предназначена к применению в терапевтической стоматологии для очистки и расширения корневых каналов зубов перед пломбированием.

Свойства

Жидкость Trimlat в роли смазки облегчает движение файла и, химически воздействуя, расширяет корневой канал. Остатки жидкости легко смываются водой.

Способ применения

Откапывают 2-3 капли жидкости Trimlat на листок блокнота для замешивания или стеклянную пластинку. Собирают капли ватной турундой и переносят Trimlat на устье корневого канала. Оставляют на 2-3 минуты и начинают механическое расширение.

Далее канал тщательно промывают водой, обрабатывают раствором гипохлорита натрия или

3% раствором перекиси водорода, после чего высушивают сжатым воздухом.

После обработки можно приступать к заполнению канала выбранным пломбировочным материалом.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП "Латус"

61010 г. Харьков,

ул. Текстильная, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**





Trimlat®

Рідина для обробки каналів

Призначення

Рідина Trimlat призначена до застосування у терапевтичній стоматології для розширення та очищення корневих каналів зубів перед пломбуванням.

Властивості

Рідина Trimlat у якості мастила полегшує рух файлу та, хімічно впливаю, розширює корневий канал. Залишки рідини легко змиваються водою.

Спосіб застосування

Відкапують 2-3 краплини рідини Trimlat на аркуш блокноту для замішування або скляну пластинку. Збирають краплі ватною турундою та переносять Trimlat на гирло кореневого каналу. Залишають на 2-3 хвилини та починають механічне розширення.

Далі канал ретельно промивають водою, оброблюють розчином гіпохлориту натрію або 3% розчином перекису водню, після чого висушують стисненим повітрям.

Після обробки можна розпочинати заповнення каналу обраним пломбувальним матеріалом.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»

61010 м. Харків,

вул. Текстильна, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

