

Инструкция по применению



Izumrud®

Кариес-маркер

Назначение

Izumrud применяется в терапевтической стоматологии как индикатор для выявления пораженного кариесом и деминерализованного слоя дентина.

Свойства

Izumrud содержит в составе поверхностно-активный носитель, активатор, краситель и наполнитель.

Izumrud позволяет легко различить пораженный кариесом и деминерализованный слой дентина путем окрашивания в ярко-зеленый цвет наружных слоев кариозного дентина. Izumrud не окрашивает нормальный дентин и здоровую эмаль.

Кариес-маркер соединяется с денатурированным коллагеном, содержащимся в кариозном дентине, и окрашивает его в течение короткого времени, что позволяет удалить только наружную окрашенную часть дентина, не затрагивая неинфицированные области.

Способ применения

Вскрывают пораженную кариесом область соответствующим бором. Очищают и тщательно промывают водой обрабатываемый участок. Сушат обрабатываемый участок потоком воздуха, так как избыточная влага будет препятствовать эффективному процессу окрашивания. Наносят каплю Izumrud из флакона-капельницы на микрокисточку, микроапликатор или ватный шарик и вносят в кариозную полость на 10 секунд. Промывают обрабатываемую полость водой, а затем сушат потоком воздуха. Удаляют окрашенный в зелёный цвет дентин соответствующим бором или стоматологическим экскаватором.

Редакция 08.2020

Когда весь окрашенный слой будет удален, повторяют процедуру со свежей каплей Izumrud. После окончания манипуляций тщательно промывают и сушат полость. После чего приступают к дальнейшим процедурам.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП "Латус"

61010, г.Харьков,

Только для профессионального использования



Інструкція по застосуванню



Izumrud®

Карієс-маркер

Призначення

Izumrud застосовується в терапевтичній стоматології як індикатор для виявлення ураженого карієсом і демінералізованого шару дентину.

Властивості

Izumrud містить поверхнево-активний носій, активатор, барвник і наповнювач.

Izumrud дозволяє легко розрізнити в ураженій карієсом і демінералізований шар дентину шляхом фарбування в яскраво-зелений колір зовнішніх шарів каріозного дентину. Izumrud не фарбує нормальний дентин і здорову емаль.

Карієс-маркер з'єднується з денатурованим колагеном, що міститься в каріозному дентині, і забарвлює його протягом короткого часу, що дозволяє видалити тільки зовнішню забарвлену частину дентину, не зачіпаючи неінфіковані області.

Спосіб застосування

Розкривають уражену карієсом область відповідним бором. Очищають і ретельно промивають водою оброблювану ділянку. Сушать оброблювану ділянку потоком повітря, так як надлишкова волога буде перешкоджати ефективному процесу фарбування. Наносять краплю Izumrud з флакона-крапельниці на мікропензлик, мікроаплікатор або ватяну кульку і вносять у каріозну порожнину на 10 секунд. Промивають порожнину, що обробляється, водою, а потім сушать потоком повітря. Видаляють пофарбований в зелений колір дентин відповідним бором або стоматологічним екскаватором.

Коли весь пофарбований шар буде видалений, повторюють процедуру

Редакція 08.2020

зі свіжою краплею Izumrud. Після закінчення маніпуляцій ретельно промивають і сушать порожнину. Після чого приступають до подальших процедур.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°С. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП "Латус"

Тільки для професійного використання

