



Calcisole®

Паста гидроксидкальциевая
регенерирующая

Назначение

Calcisole предназначен к применению в стоматологии:

- в качестве прокладки при лечении глубокого кариеса под постоянные и временные пломбы;
- для защиты пульпы от бактериальных и химических воздействий;
- для регенерации травмированной или воспаленной пульпы при пульпитах.

Свойства

Calcisole представляет собой пасту белого цвета, готовую к применению.

Нанесенный слой пасты быстро высыхает, образуя достаточно прочную защитную пленку, которая длительное время, за счет содержания в пасте гидроксида кальция, поддерживает повышенную щелочную реакцию (до pH 12), стимулирует регенерационные процессы в тканях зуба и оказывает антимикробное действие. Выделяющиеся в течение длительного времени ионы фтора обеспечивают высокий противокариесный эффект.


Материал рентгеноконтрастный.

Способ применения

Перед применением пасты Calcisole тщательно очищают и просушивают полость зуба. Небольшое количество пасты вносят шпательной лопаткой в зону рога пульпы и распределяют по дну полости. Толщина слоя должна быть примерно 0,2-0,5 мм. Пасту сушат в течение 20-30 секунд сжатым воздухом от стоматологической установки. Через 1-2 минуты можно наносить при необходимости изолирующую прокладку или материал для временного пломбирования.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

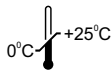

**Только для
профессионального
использования**



UA.TR.002





Calcisole®

Паста гідроксидкальцієва
регенеруюча

Призначення

Calcisole призначений до застосування в стоматології:

- як прокладка при лікуванні глибокого карієсу під постійні і тимчасові пломби,
- для захисту пульпи від бактеріальних і хімічних впливів,
- для регенерації травмованої або запаленої пульпи при пульпітах.

Властивості

Calcisole представляє собою пасту білого кольору, готову до застосування.

Нанесений шар пасту швидко висихає, утворюючи досить міцну захисну плівку, яка тривалий час, за рахунок вмісту в пасті гідроксиду кальцію, підтримує підвищену лужну реакцію (до рН 12), стимулює регенераційні процеси в тканинах зуба і має антимікробну дію. Іони фтору, що виділяються протягом тривалого часу, забезпечують високий протикарієсний ефект. Матеріал рентгеноконтрастний.

Спосіб застосування


Перед застосуванням пасту Calcisole ретельно очищають і просушують

порожнину зуба. Невелику кількість пасту вносять штопфером в зону рогу пульпи і розподіляють по дну порожнини. Товщина шару має бути приблизно 0,2-0,5 мм. Пасту сушать протягом 20-30 секунд стисненням повітрям від стоматологічної установки. Через 1-2 хвилини можна наносити при необхідності ізолюючу прокладку або матеріал для тимчасового пломбування.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище + 25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків

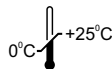

**Тільки для
професійного
використання**



UA.TR.002

