

Laterock® Model Тип 3

Редакція 06.2020

Гіпс стоматологічний

Гипс стоматологический

Назначение

Гипс Laterock Model тип 3 применяется для изготовления моделей в зуботехнической лаборатории.

Свойства

Порошок белого цвета.

Время отверждения- 6-15 минут.

Прочность при сжатии через 1 час- не менее 20 МПа.

Пропорция

100 г гипса на 29 мл воды.

Условия хранения

Хранить в сухом месте в герметичной упаковке.

Призначення

Гіпс Laterock Model тип 3 застосовується для виготовлення моделей в зуботехнічній лабораторії.

Властивості

Порошок білого кольору.

Час затвердіння -6-15 хвилин.

Міцність при стисканні через - 1 годину не менше 20 МПа.

Пропорція

100 г гіпсу на 29 мл води.

Умови зберігання

Зберігати у сухому місці в герметичній упаковці.

