



Soft etch

Гель травильный

Назначение

Гель предназначен для протравливания эмали и дентина перед пломбированием зуба.

Состав

Гель травильный содержит 37% ортофосфорной кислоты. Изготовлен на органической основе.

Свойства

Гель обладает тиксотропными свойствами, что позволяет зафиксировать его на поверхности зуба. Сиреневый цвет геля облегчает визуальный контроль точного нанесения. Гель полностью смывается водой.

Применение

Необходимое количество геля с помощью аппликатора наносят на эмаль и/или дентин. Выдержка геля на эмали составляет 30 секунд, на дентине - 15 секунд. После этого гель тщательно смывают струей воды под давлением в течение 10-15 секунд и сушат 15 секунд сжатым воздухом до слегка увлажненного состояния дентина и потускнения эмали, исключая контакт со слюной. При повышенной резистенции эмали травление необходимо повторить не более 30 секунд.


Рекомендации

При хранении геля возможно его загустение. Для получения требуемой консистенции и предотвращения разбрызгивания геля при дозировании поршень шприца оттянуть на себя на 2-3 мм, выдавить гель на стекло и перемешать.


Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования гель плотно закрыть.

Дополнительная упаковка.

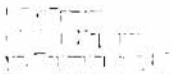

Только для профессионального использования

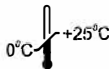



Soft etch

Гель труючий

Призначення

Гель призначений для протруювання емалі та дентину перед пломбуванням зуба.

Склад

Гель труючий містить 37% ортофосфорної кислоти. Виготовлений на органічній основі.

Властивості

Гель володіє тіксотропними властивостями, що дозволяє зафіксувати його на поверхні зуба. Бузковий колір гелю полегшує візуальний контроль точного нанесення. Гель повністю змивається водою.

Застосування

Необхідну кількість гелю за допомогою аплікатора наносять на емаль і / або дентин. Витримка гелю на емалі становить 30 секунд, на дентині -15 секунд. Після цього гель ретельно змивають струменем води під тиском протягом 10-15 секунд і сушать 15 секунд стисненням повітрям до злегка зволоженого стану дентину і потьмяніння емалі, виключаючи контакт зі слиною. При підвищеній резистенци емалі протруєння необхідно повторити не більше 30 секунд.

Рекомендації

При зберіганні гелю можливо його загустіння. Для отримання необхідної консистенції і запобігання розбризкування гелю при дозуванні, необхідно поршень шприца відтягнути на себе на 2-3 мм, видавити геля на скло і перемішати.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання гель щільно закрити.

Додаткова упаковка.

Тільки для професійного використання

