



Отбел

Средство для отбеливания
нержавеющей стали

Назначение

Средство Отбел предназначено для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов.

Свойства

Отбел представляет собой водный раствор из смеси разбавленной соляной и азотной кислот. Хорошо растворяет окисную пленку, при этом минимально воздействует на металл.

Способ применения

Средство нагревают до температуры + 50...60°C. В нагретое средство помещают протез на 1-2 минуты. По окончании времени выдержки протез извлекают из средства,

промывают под проточной водой и просушивают.

Внимание! Избегать попадания средства в глаза и на открытые участки кожи.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

Только для профессионального использования



LaTus

Отбел

Засіб для відбілювання
нержавіючої сталі

Призначення

Засіб Отбел призначений для зняття з нержавіючої сталі окисної плівки, що утворюється при термічній обробці сталевих протезів.

Властивості

Отбел являє собою водний розчин з суміші розведеної соляної та азотної кислот. Добре розчиняє окисну плівку, при цьому мінімально впливає на метал.

Спосіб застосування

Засіб нагрівають до температури +50...60°C. У нагрітій засіб поміщають протез на 1-2 хвилини. Після закінчення часу витримки протез витягують з

засобу, промивають під проточною водою і просушують.

Увага! Уникати попадання засіб в очі і на відкриті ділянки шкіри.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»

61010 м. Харків,

вул.Текстильна, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

