

Инструкция по применению

Редакция 03.2021



Polacryl®

Порошок
полировальный

Назначение

Порошок Polacryl предназначен для зеркального полирования протезов из пластмассы.

Свойства

Порошок Polacryl изготовлена на основе абразивного, мелкодисперсного материала, содержит абразивные компоненты с размером частиц 30-50 мкм.

Способ применения


Порошок смешивают с необходимым количеством воды. Затем увлажненный порошок наносят на полировочный инструмент или полирующий носитель.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал
плотно закрыть.

ЧП «Латус»

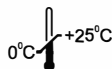

**Только для
профессионального
использования**



Інструкція по застосуванню

Редакція 03.2021



Polacryl®

Порошок
полірувальний

Призначення

Порошок Polacryl призначений для дзеркального полірування протезів з пластмаси.

Властивості

Порошок Polacryl виготовлена на основі абразивного, дрібнодисперсного матеріалу, містить абразивні компоненти з розміром частинок 30-50 мкм.

Спосіб застосування


Порошок змішують з необхідною кількістю води. Потім зволожений порошок наносять на полірувальний інструмент або поліруючий носій.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал
щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків

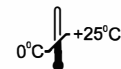

**Тільки для
професійного
використання**

