

Polacryl

Паста полировальная

Назначение

Паста полировальная **Polacryl** предназначена для окончательной обработки всех видов конструкций зубных протезов из полимеров.

Состав и свойства

Паста полировальная **Polacryl** изготовлена на основе абразивного, мелкодисперсного материала. Паста имеет нейтральный серый цвет, гелеобразную консистенцию, не растекается, пластичная, легко смывается водой, без запаха.

Способ применения

Окончательную шлифовку и полировку производят укрепленными в шлифмоторе войлочными или фетровыми фильцами различной формы. Начинать с конусообразного, нанося пасту на фильц и

протез. Затем вместо фильца вставляют в шлифмотор жесткую щетку и при постоянном смазывании поверхности полировальной пастой, продолжают шлифовку. Не следует при этом допускать перегревания базиса протеза. Завершают полировку мягкой пушистой щеткой.

Условия хранения

Polacryl в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Polacryl

Паста полірувальна

Призначення

Паста полірувальна **Polacryl** призначена для остаточної обробки всіх видів конструкцій зубних протезів з полімерів.

Склад та властивості

Паста полірувальна **Polacryl** виготовлена на основі абразивного, дрібнодисперсного матеріалу. Паста має нейтральний сірий колір, желеподібну консистенцію, не розтікається, пластична, легко змивається водою, без запаху.

Спосіб застосування

Остаточне шліфування й полірування здійснюють закріпленими в шліфмоторі повстяними або фетровими фільцями різної форми. Починати з конусоподібного, завдаючи пасту на фільць і протез. Потім замість фільця вставляють в шліфмотор

жорстку щітку і при постійному змазуванні поверхні полірувальною пастою, продовжують шліфовку. Не слід при цьому допускати перегрівання базису протеза. Завершують полірування м'якою пухнастою щіткою.

Умови збереження

Polacryl в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів.