



Proclean[®] Z

Паста полировальная цирконовая

Назначение

Паста Proclean Z предназначена для эффективной очистки и полировки зуба, удаления зубных отложений, камней и налёта курильщика с минимальными повреждениями эмали.

Паста Proclean Z со фтором оказывает, кроме этого, еще и профилактическое действие.

Состав

Паста Proclean Z приготовлена на основе силиката циркония с размером частиц 3-5 мкм. Также в состав пасты входит ментол.

В варианте Proclean Z со фтором в состав пасты входит фторвыделяющий наполнитель.

Способ применения

Перед началом обработки наносят на поверхность зуба небольшое количество пасты для максимальной эффективности чистки. Выдавливают небольшое количество пасты из шприца в резиновую чашку или на щётку. Обрабатывают чашкой (щёткой) поверхность зуба около 10 секунд, (к

). Продолжают процедуру до тех пор, пока все открытые поверхности зубов будут тщательно очищены и отполированы. Остатки пасты легко смываются водой.

Резиновая чашка или щётка с мягкой щетиной могут быть использованы для очистки на жевательной поверхности. Для очистки межзапроксимальной области необходимо использовать не покрывающую воском зубную нить.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.



**Только для
профессионального
использования**





Proclean[®] Z

Паста полірувальна цирконова

Призначення

Паста Proclean Z призначена для ефективного очищення і полірування зуба, видалення зубних відкладень, каменів і нальоту курця з мінімальними пошкодженнями емалі.

Паста Proclean Z зі фтором чинить, крім цього, ще й профілактичну дію.

Склад

Паста Proclean Z виготовлена на основі силікату цирконію з розміром часток 3-5 мкм. Також до складу пасту входить ментол.

У варіанті Proclean Z зі фтором до складу пасту входить наповнювач, що виділяє фтор.

Спосіб застосування

Перед початком обробки наносять на поверхню зуба невелику кількість пасту для максимальної ефективності чищення. Видавлюють невелику кількість пасту зі шприца в гумову чашку або на щітку. Обробляють чашкою (щіткою) поверхню зуба близько 10 секунд, (край чашки повинен опускатися нижче за вільний край ясен в ясневій борозні). Продовжують процедуру до тих пір,

доки всі відкриті поверхні зубів будуть ретельно очищені і відполіровані. Залишки пасту легко змиваються водою.

Гумова чашка або щітка з м'якою щетиною можуть бути використані для очищення на жувальній поверхні.

Для очищення межাপроксимальної області необхідно використовувати не покриту воском зубну нитку.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.



**Тільки для
професійного
використання**

