

Назва медичного виробу: ПОЗИЦІОНЕР ДАТЧИКА, ДЕНБАЙТ, ІНТРО ПАКЕТ

Варіанти комплектацій: розмір 1 або розмір 2

(1x позиціонер датчика Байтвінг, 1x позиціонер датчика Періапікал UR, 1x позиціонер датчика Періапікал UL, 1x позиціонер датчика Пастеріо UR, 1x позиціонер датчика Пастеріо UL, 1x позиціонер датчика Ендо UR, 1x позиціонер датчика Ендо UL, 1x кільце для позиціонування).

ПОЗИЦІОНЕР ДАТЧИКА перед використанням обов'язково стерилізуйте в автоклаві або термодезінфекторі при 134 ° C / 273 ° F.

Інструкція з використання

В основному ці інструкції призначені для сертифікованих фахівців в галузі стоматології.

Очищення та стерилізація

Перед тим як розмістити датчик у позиціонері, використовуйте новий гігієнічний рукав для кожного пацієнта. Тримач сенсора повинен бути стерилізований перед першим використанням і перед використанням для кожного пацієнта. Процедура очищення та стерилізації

Перед використанням, завжди вдягайте на датчик новий гігієнічний рукав перед тим, як вставити датчик у позиціонер, процедура є обов'язковою для кожного пацієнта. Після використання позиціонер необхідно очистити та стерилізувати.

1. Видаліть гігієнічний рукав.
2. Зніміть кільце для позиціонування.
3. Видаліть видимі засмічення з позиціонера, промийте гарячою водою з милом або з миючим засобом.
4. Промийте позиціонер теплою водопровідною водою.
5. Автоклавуйте з циклом відповідно до інструкцій виробника автоклава.

НЕ перевищувати 134 ° C / 273 ° F, тільки для парових стерилізаторів.

НЕ використовуйте хімічні автоклави.

НЕ використовуйте сухо-жарові стерилізатори.

НЕ допускайте контакту пластикових деталей з металевою поверхнею автоклава. НЕ використовуйте глутаральдегід на основі фенолу.

Примітка:

Пластикові деталі мають обмежений термін експлуатації і при повторній стерилізації знебарвлюються.

Після декількох циклів автоклавування позиціонери зношуються. Утилізуйте їх відповідно до місцевих норм. Для заміни зношених позиціонерів доступні комплекти для поповнення.

Кільце для позиціонування

Вийміть позиціонер датчика, щоб змінити положення і використовувати іншу точку фіксації кільця для позиціонування.

BITEWING

sensor size 1 Prod. nr. DBU2001
sensor size 2 Prod. nr. DBU2002

Left



Right



PERIAPICAL

sensor size 1 Prod. nr. DBU2021
sensor size 2 Prod. nr. DBU2022

UR/LL



UL/LR



POSTERIOR

sensor size 1 Prod. nr. DBU2011
sensor size 2 Prod. nr. DBU2012

UR/LL



UL/LR



ENDO

sensor size 1 Prod. nr. DBU2031
sensor size 2 Prod. nr. DBU2032

UR/LL



UL/LR

